



Material de recubrimiento VITA

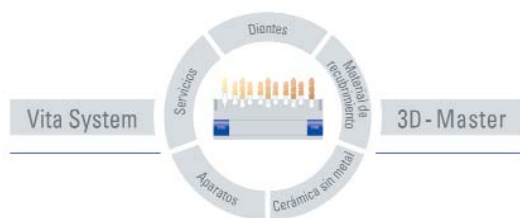

VITAVM®13

Cerámica de estructura fina para estructuras metálicas con un valor CET convencional

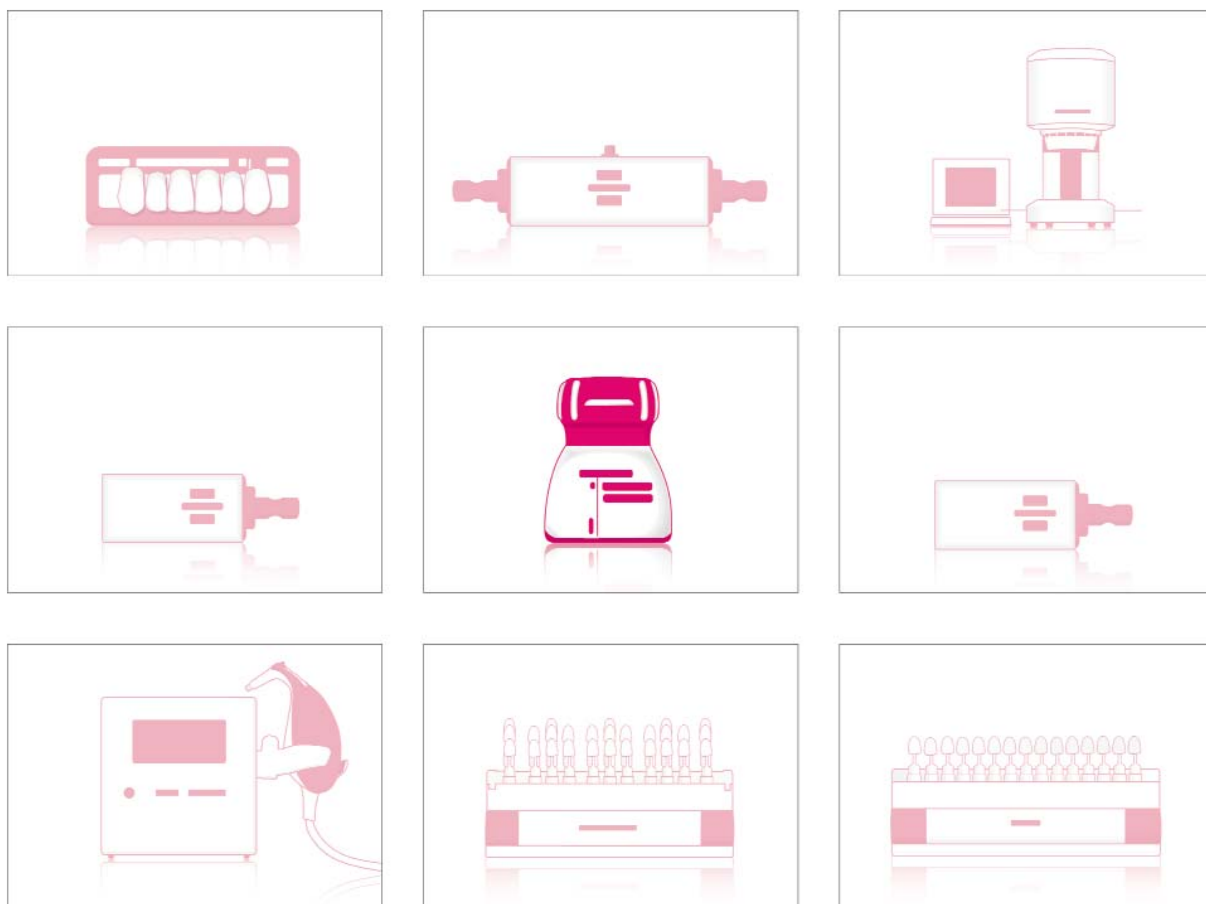

Descripción del producto

VITA VM 13 se ha desarrollado como cerámica de recubrimiento de feldespato para todas las aleaciones habituales con un CET entre 13,8 y 15,2.

El valor CET y la temperatura de cocción de VITA VM 13 se han optimizado para su uso con aleaciones con un alto contenido de oro, aleaciones con un contenido reducido de oro, aleaciones con base de paladio y aleaciones sin metales nobles.

En Internet encontrará una tabla de la compatibilidad CET con aleaciones probadas (www.vita-zahnfabrik.com).

Como todos los materiales de la gama VITA VM, VITA VM 13 se caracteriza por un comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte.

Los materiales complementarios fluorescentes y opalescentes permiten conseguir resultados muy personalizados y de alto valor estético.

Ventajas

- propiedades de manipulación óptimas, tales como la estabilidad y la facilidad de modelado
- excelente facilidad de tallado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada en la boca
- superficies homogéneas y lisas
- extraordinaria similitud con el esmalte
- resultados estéticos excelentes
- amplia oferta de materiales complementarios para personalizar las prótesis
- compatible con los materiales VITA AKZENT y VITA INTERNO

Surtidos VITAVM® 13

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VM 13 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV13BK12 * / **

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
26	12 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
5	12 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
1	unidad	VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	envase	Bases de cocción G
1	envase	Soportes de cocción A + B
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL (ref. BV13BKS12) en los siguientes colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, WO, OP1-OP4, CP1-CP5, COR1, NT, ENL, END, WIN

** También disponible en 26 colores con OPAQUE PASTE (ref. BV13BK12P) y con OPAQUE PASTE como BASIC KIT



VITA VM 13 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV13BUK12 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
		Instrucciones de uso

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL (ref. BV13BUKS12) en los siguientes 15 colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3

VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

ref. BV13BLK *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE OPO
3	12 g	BASE DENTINE 0M1-0M3
3	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1-0M3
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP 0M
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (ref. BV13BLKP)



VITA VM 13 ONE COLOR KIT 3M2

Surtido monocromo para las primeras pruebas

ref. BV13OCK3M2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
1	12 g	OPAQUE OP3
1	12 g	BASE DENTINE 3M2
1	12 g	TRANSPA DENTINE 3M2
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	unidad	Varillas de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible en 2M2 (ref. BV13OCK2M2)



VITA VM 13 PROFESSIONAL KIT

Para añadir efectos y características naturales

ref. BV13PK *

Cantidad	Contenido	Descripción
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 g	MAMELON MM1-MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1-EP3
3	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO3
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
6	12 g	EFFECT LINER EL1-EL6
1	unidad	Guía de colores EFFECT ENAMEL
1	unidad	Guía de colores EFFECT CHROMA
1	unidad	Guía de colores EFFECT LINER
		Instrucciones de uso

* También disponible como PROFESSIONAL KIT SMALL (ref. BV13PKS) en los siguientes 15 colores: EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11





VITA VM 13 GINGIVA KIT
Materiales gingivales de aspecto natural
ref. BV13GK *

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
2	12 g	GINGIVA OPAQUE GOL-GOD
1	unidad	Guía de colores GINGIVA
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BV13GKP)



VITA VM 13 MARGIN KIT
Para la configuración de hombros cerámicos
ref. BV13MK

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	unidad	Guía de colores MARGIN
		Instrucciones de uso



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM 13	Instrucciones de uso	1180
VITA VM 13	Folleto	1229
VITA VM 13	Hoja de información	1561
VITA VM 13	Bloc de hojas de pedido 3D-MASTER	1205M
VITA VM 13	Bloc de hojas de pedido classical	1542M
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
VITA VM	Carpeta de imagen completa	1284
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)

Productos VITAVM®13

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B4525912	B4525950

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
WO	B453597

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
OP0	B4525012	B4525050
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	B4525550

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
OM1	B4503112	B4503150	-	ENL
OM2	B4503212	B4503250	-	ENL
OM3	B4503312	B4503350	-	ENL
1M1	B4503412	B4503450	-	ENL
1M2	B4503512	B4503550	-	ENL
2L1.5	B4503612	B4503650	-	ENL
2L2.5	B4503712	B4503750	-	ENL
2M1	B4503812	B4503850	-	ENL
2M2	B4503912	B4503950	B45039250	ENL
2M3	B4504012	B4504050	B45040250	ENL
2R1.5	B4504112	B4504150	-	ENL
2R2.5	B4504212	B4504250	-	ENL
3L1.5	B4504312	B4504350	-	ENL
3L2.5	B4504412	B4504450	-	ENL
3M1	B4504512	B4504550	-	ENL
3M2	B4504612	B4504650	B45046250	ENL
3M3	B4504712	B4504750	B45047250	ENL
3R1.5	B4504812	B4504850	-	ENL
3R2.5	B4504912	B4504950	-	ENL
4L1.5	B4505012	B4505050	-	END
4L2.5	B4505112	B4505150	-	END
4M1	B4505212	B4505250	-	END
4M2	B4505312	B4505350	-	END
4M3	B4505412	B4505450	-	END
4R1.5	B4505512	B4505550	-	END
4R2.5	B4505612	B4505650	-	END
5M1	B4505712	B4505750	-	END
5M2	B4505812	B4505850	-	END
5M3	B4505912	B4505950	-	END

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
0M1	B4506112	B4506150	-	ENL
0M2	B4506212	B4506250	-	ENL
0M3	B4506312	B4506350	-	ENL
1M1	B4506412	B4506450	-	ENL
1M2	B4506512	B4506550	-	ENL
2L1.5	B4506612	B4506650	-	ENL
2L2.5	B4506712	B4506750	-	ENL
2M1	B4506812	B4506850	-	ENL
2M2	B4506912	B4506950	B45069250	ENL
2M3	B4507012	B4507050	B45070250	ENL
2R1.5	B4507112	B4507150	-	ENL
2R2.5	B4507212	B4507250	-	ENL
3L1.5	B4507312	B4507350	-	ENL
3L2.5	B4507412	B4507450	-	ENL
3M1	B4507512	B4507550	-	ENL
3M2	B4507612	B4507650	B45076250	ENL
3M3	B4507712	B4507750	B45077250	ENL
3R1.5	B4507812	B4507850	-	ENL
3R2.5	B4507912	B4507950	-	ENL
4L1.5	B4508012	B4508050	-	END
4L2.5	B4508112	B4508150	-	END
4M1	B4508212	B4508250	-	END
4M2	B4508312	B4508350	-	END
4M3	B4508412	B4508450	-	END
4R1.5	B4508512	B4508550	-	END
4R2.5	B4508612	B4508650	-	END
5M1	B4508712	B4508750	-	END
5M2	B4508812	B4508850	-	END
5M3	B4508912	B4508950	-	END

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CO1	naranja	B4528112
CO2	marrón	B4528212
CO3	lila	B4528312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
CO1	naranja	B453815
CO2	marrón	B453825
CO3	lila	B453835

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G0L	rojo claro	B4527112
G0D	rojo oscuro	B4527312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
G0L	rojo claro	B453715
G0D	rojo oscuro	B453735

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 GINGIVA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4523112
G2	rosa anaranjado	B4523212
G3	rosa	B4523312
G4	rojo pardusco	B4523412
G5	negro rojizo	B4523512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 MARGIN, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
M1	blanco	B4526112
M4	amarillo	B4526412
M5	ámbar	B4526512
M7	beige claro	B4526712
M8	marrón pastel	B4526812
M9	naranja claro	B4526912

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EL1	blanco	B4514112
EL2	beige	B4514212
EL3	marrón	B4514312
EL4	amarillo	B4514412
EL5	naranja	B4514512
EL6	amarillo verdoso	B4514612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CP1	marfil	B4524112
CP2	beige amarillento	B4524212
CP3	marrón anaranjado claro	B4524312
CP4	marrón	B4524412
CP5	verde pardusco	B4524512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EC1	para efectos blanquecinos	B4512212
EC2	beige arena	B4512222
EC3	amarillo claro	B4512312
EC4	amarillo limón pálido	B4512412
EC5	naranja claro	B4512512
EC6	naranja	B4512612
EC7	rosa	B4512712
EC8	beige pardusco	B4512812
EC9	marrón	B4512912
EC10	verde pardusco	B4513012
EC11	verde grisáceo	B4513112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 MAMELON, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MM1	beige	B4516112
MM2	amarillo pardusco cálido	B4516212
MM3	naranja pálido	B4516312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EE1	blanquecino	B4509112
EE2	blanquecino translúcido	B4509212
EE3	rosa translúcido	B4509312
EE4	amarillento	B4509412
EE5	amarillento translúcido	B4509512
EE6	rojizo translúcido	B4509612
EE7	naranja translúcido	B4509712
EE8	rojo translúcido	B4509812
EE9	azulado translúcido	B4509912
EE10	azul	B4510012
EE11	gris	B4510112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EO1	neutro	B4517112
EO2	blanquecino	B4517212
EO3	azulado	B4517312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EP1	amarillo pastel	B4515112
EP2	naranja pastel	B4515212
EP3	rosado pastel	B4515312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4522112
COR2	beige	B4522212
COR3	marrón	B4522312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 13 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective, Color Opaque	B340
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1-EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, E01-E03, EP1-EP3, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1-EE11	B416
Guía de colores GINGIVA	G1-G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VM 13 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	250 ml	BML250N
VITA MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	50 ml	BMF50
VITA MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	250 ml	BMF250
VITA VM PASTE FLUID	Para modificar la consistencia de OPAQUE PASTE y COLOR OPAQUE PASTE	15 ml	BPF15V1
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de OPAQUE y COLOR OPAQUE	50 ml	BVMOF50
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de OPAQUE y COLOR OPAQUE	250 ml	BVMOF250

Surtidos VITAVM® 13

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA VM 13 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV13BK12C * / **

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
5	12 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
1	unidad	VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	envase	Bases de cocción G
1	envase	Soportes de cocción A + B
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso



* También disponible como BASIC KIT SMALL classical (ref. BV13BKS12C) en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3, WO, CP1-CP5, COR1, NT, ENL, END, WIN

** También disponible en 16 colores con OPAQUE PASTE (ref. BV13BK12PC) y con OPAQUE PASTE como BASIC KIT SMALL classical (ref. BV13BKS12PC)



VITA VM 13 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP
Ref. BV13BUK12C *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
		Instrucciones de uso

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL classical (ref. BV13BUKS12C) en los siguientes 6 colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM 13 CLASSICAL COLOR KIT

Surtido de ampliación para los usuarios de VITA VM 13
3D-MASTER*
ref. BV13CCK12 **

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
16	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso

* Surtido para los clientes de VITA VM 13 3D-MASTER que deseen ampliar su surtido actual con VITAPAN classical

** También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BV13CCK12P)



VITA VM 13 ONE COLOR KIT A3

Surtido monocromo para las primeras pruebas
ref. BV13CKA3 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
1	12 g	OPAQUE A3
1	12 g	BASE DENTINE A3
1	12 g	TRANSPA DENTINE A3
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	unidad	Varillas de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con A2 (ref. BV13CKA2)

Productos VITAVM®13

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B4525912	B4525950

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
WO	B453597

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4540112	B4540150	ENL
A2	B4540212	B4540250	ENL
A3	B4540312	B4540350	ENL
A3.5	B4540412	B4540450	END
A4	B4540512	B4540550	END
B1	B4540612	B4540650	END
B2	B4540712	B4540750	END
B3	B4540812	B4540850	END
B4	B4540912	B4540950	END
C1	B4541012	B4541050	END
C2	B4541112	B4541150	END
C3	B4541212	B4541250	ENL
C4	B4541312	B4541350	ENL
D2	B4541412	B4541450	END
D3	B4541512	B4541550	END
D4	B4541612	B4541650	END

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g	Asignación del esmalte
A1	B453015	ENL
A2	B453025	ENL
A3	B453035	ENL
A3.5	B453045	END
A4	B453055	END
B1	B453065	END
B2	B453075	END
B3	B453085	END
B4	B453095	END
C1	B453105	END
C2	B453115	END
C3	B453125	ENL
C4	B453135	ENL
D2	B453145	END
D3	B453155	END
D4	B453165	END

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4543112	B4543150	ENL
A2	B4543212	B4543250	ENL
A3	B4543312	B4543350	ENL
A3.5	B4543412	B4543450	END
A4	B4543512	B4543550	END
B1	B4543612	B4543650	END
B2	B4543712	B4543750	END
B3	B4543812	B4543850	END
B4	B4543912	B4543950	END
C1	B4544012	B4544050	END
C2	B4544112	B4544150	END
C3	B4544212	B4544250	ENL
C4	B4544312	B4544350	ENL
D2	B4544412	B4544450	END
D3	B4544512	B4544550	END
D4	B4544612	B4544650	END

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4545112	B4545150	ENL
A2	B4545212	B4545250	ENL
A3	B4545312	B4545350	ENL
A3.5	B4545412	B4545450	END
A4	B4545512	B4545550	END
B1	B4545612	B4545650	END
B2	B4545712	B4545750	END
B3	B4545812	B4545850	END
B4	B4545912	B4545950	END
C1	B4546012	B4546050	END
C2	B4546112	B4546150	END
C3	B4546212	B4546250	ENL
C4	B4546312	B4546350	ENL
D2	B4546412	B4546450	END
D3	B4546512	B4546550	END
D4	B4546612	B4546650	END

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA VM 13 3D-MASTER

VITA VM 13 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective, Color Opaque	B341
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1-EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, E01-E03, EP1-EP3, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1-EE11	B416
Guía de colores GINGIVA	G1-G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VM 13 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	250 ml	BML250N
VITA MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	50 ml	BMF50
VITA MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	250 ml	BMF250
VITA VM PASTE FLUID	Para modificar la consistencia de OPAQUE PASTE y COLOR OPAQUE PASTE	15 ml	BPF15V1
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de OPAQUE y COLOR OPAQUE	50 ml	BVMOF50
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de OPAQUE y COLOR OPAQUE	250 ml	BVMOF250

VITA OMEGA 900



Descripción del producto

VITA OMEGA 900 es una cerámica de estructura fina especialmente indicada para aleaciones amarillas con elevado contenido en oro con un valor CET de aproximadamente 13,8-15,2. Mediante la guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER se determinan de manera sistemática todos los colores de dientes naturales y mediante la estratificación estándar VITA OMEGA 900 se reproducen de forma completa.

Lista de aleaciones

Encontrará información más detallada sobre combinaciones ya probadas con éxito por VITA en nuestra lista de aleaciones (documento nº 707M).

Surtidos VITA OMEGA 900

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VIT BLEACHED SHADE REPRODUCTION KIT Ref. BO9BLKIT12

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE OPO
3	12 g	OPAQUE DENTINE 0M1-0M3
3	12 g	DENTINE 0M1-0M3
1	12 g	ENAMEL EN2
1	50 ml	VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	VITA BLEACHED SHADE GUIDE GROUP OM
		Instrucciones de uso



VITA OMEGA 900 STANDARD SET 12 Ref. BP9SET123D *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
26	12 g	OPAQUE 1M1-5M3
26	12 g	OPAQUE DENTINE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
2	12 g	ENAMEL EN2, EN4
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	envase	Soportes de cocción A+B
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	Indicador de color
2	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso



* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. BO9SET12PO3D)

VITA OMEGA 900 STARTER KIT 3M2 Ref. BO9KITS3M2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE 3M2
1	12 g	OPAQUE 3M2
1	12 g	DENTINE 3M2
1	12 g	ENAMEL EN2
1	12 g	TRANSLUCENT
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso



* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. BO9KITS3M2PO)

Productos VITA OMEGA 900

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA OMEGA 900 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B900012	B900050

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 PASTE WASH OPAQUE, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
WO	B92007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
OP0	B970012	-
1M1	B930112	B930150
1M2	B930212	B930250
2L1.5	B930312	B930350
2L2.5	B930412	B930450
2M1	B930512	B930550
2M2	B930612	B930650
2M3	B930712	B930750
2R1.5	B930812	B930850
2R2.5	B930912	B930950
3L1.5	B931012	B931050
3L2.5	B931112	B931150
3M1	B931212	B931250
3M2	B931312	B931350
3M3	B931412	B931450
3R1.5	B931512	B931550
3R2.5	B931612	B931650
4L1.5	B931712	B931750
4L2.5	B931812	B931850
4M1	B931912	B931950
4M2	B932012	B932050
4M3	B932112	B932150
4R1.5	B932212	B932250
4R2.5	B932312	B932350
5M1	B932412	B932450
5M2	B932512	B932550
5M3	B932612	B932650

VITA OMEGA 900 PASTE OPAQUE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
1M1	B94015
1M2	B94025
2L1.5	B94035
2L2.5	B94045
2M1	B94055
2M2	B94065
2M3	B94075
2R1.5	B94085
2R2.5	B94095
3L1.5	B94105
3L2.5	B94115
3M1	B94125
3M2	B94135
3M3	B94145
3R1.5	B94155
3R2.5	B94165
4L1.5	B94175
4L2.5	B94185
4M1	B94195
4M2	B94205
4M3	B94215
4R1.5	B94225
4R2.5	B94235
5M1	B94245
5M2	B94255
5M3	B94265

VITA OMEGA 900 OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B973112	-	EN2
0M2	B973212	-	EN2
0M3	B973312	-	EN2
1M1	B933112	B933150	EN2
1M2	B933212	B933250	EN2
2L1.5	B933312	B933350	EN2
2L2.5	B933412	B933450	EN2
2M1	B933512	B933550	EN2
2M2	B933612	B933650	EN2
2M3	B933712	B933750	EN2
2R1.5	B933812	B933850	EN2
2R2.5	B933912	B933950	EN2
3L1.5	B934012	B934050	EN2
3L2.5	B934112	B934150	EN2
3M1	B934212	B934250	EN2
3M2	B934312	B934350	EN2
3M3	B934412	B934450	EN2
3R1.5	B934512	B934550	EN2
3R2.5	B934612	B934650	EN2
4L1.5	B934712	B934750	EN2
4L2.5	B934812	B934850	EN4
4M1	B934912	B934950	EN4
4M2	B935012	B935050	EN4
4M3	B935112	B935150	EN4
4R1.5	B935212	B935250	EN4
4R2.5	B935312	B935350	EN4
5M1	B935412	B935450	EN4
5M2	B935512	B935550	EN4
5M3	B935612	B935650	EN4

VITA OMEGA 900 HIGH CHROMA OPAQUE DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
1M3	B963112
2L3.5	B963212
2M4	B963312
2R3.5	B963412
3L3.5	B963512
3M4	B963612
3R3.5	B963712
4L3.5	B963812
4M4	B963912
4R3.5	B964012
5M4	B964112

VITA OMEGA 900 DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B976112	-	EN2
0M2	B976212	-	EN2
0M3	B976312	-	EN2
1M1	B936112	B936150	EN2
1M2	B936212	B936250	EN2
2L1.5	B936312	B936350	EN2
2L2.5	B936412	B936450	EN2
2M1	B936512	B936550	EN2
2M2	B936612	B936650	EN2
2M3	B936712	B936750	EN2
2R1.5	B936812	B936850	EN2
2R2.5	B936912	B936950	EN2
3L1.5	B937012	B937050	EN2
3L2.5	B937112	B937150	EN2
3M1	B937212	B937250	EN2
3M2	B937312	B937350	EN2
3M3	B937412	B937450	EN2
3R1.5	B937512	B937550	EN2
3R2.5	B937612	B937650	EN2
4L1.5	B937712	B937750	EN4
4L2.5	B937812	B937850	EN4
4M1	B937912	B937950	EN4
4M2	B938012	B938050	EN4
4M3	B938112	B938150	EN4
4R1.5	B938212	B938250	EN4
4R2.5	B938312	B938350	EN4
5M1	B938412	B938450	EN4
5M2	B938512	B938550	EN4
5M3	B938612	B938650	EN4

VITA OMEGA 900 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B907112	B907150	-
EN2	B907212	B907250	B9072250
EN3	B907312	B907350	-
EN4	B907412	B907450	B9074250
EN5	B907512	B907550	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 WINDOW, 12 g / 50 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WIN	Material transparente	B912212	B912250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 COLOR OPAQUE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
C03	blanco	B902312
C04	malva	B902412
C06	rosa fucsia	B902612
C08	marrón oscuro	B902812

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 PASTE COLOR OPAQUE, 5 g *

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
C03	blanco	B92235
C04	malva	B92245
C06	rosa fucsia	B92265
C08	marrón oscuro	B92285

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 GINGIVA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa claro	B914112
G2	rosa oscuro	B914212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 MARGIN, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MARN	blanco	B960012
MAR1	beige claro	B960112
MAR2	beige oscuro	B960212
MAR3	beige amarillento claro	B960312
MAR4	beige amarillento	B960412
MAR5	marrón anaranjado	B960512
MAR6	beige pardusco	B960612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 LUMINARIES, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
LM1	blanco	B916112
LM2	amarillo	B916212
LM3	amarillo verdoso	B916312
LM4	amarillo rojizo	B916412
LM5	amarillo pardusco	B916512
LM6	beige	B916612
LM7	rosa pardusco	B916712

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 NUANCE, 9 g *

Denominación	Descripción	Ref. 9 g
NU1	beige amarillento	B91819
NU2	amarillo trigo	B91829
NU3	amarillo oscuro	B91839
NU4	naranja claro	B91849
NU5	naranja	B91859
NU6	rosa	B91869
NU7	marrón	B91879
NU8	marrón verdoso	B91889
NU9	azul grisáceo	B91899
NU10	blanco	B91909

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 CERVICAL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CE1	naranja claro	B909112
CE2	amarillo claro	B909212
CE3	amarillo dorado	B909312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
T1	blanquecino translúcido	B908112	B908150	-
T2	amarillento translúcido	B908212	B908250	-
T4	neutro translúcido	B908412	B908450	B9084250
T5	azulado translúcido	B908512	B908550	-
T6	azul translúcido	B908612	B908650	-
T8	marrón rojizo claro	B908812	B908850	-
T9	rojizo translúcido	B908912	B908950	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 OPAL TRANSLUCENT, 12g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
OT1	azul translúcido	B915112
OT2	rosa translúcido	B915212
OT3	blanco translúcido	B915312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 CORRECTIVE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B917112
COR2	beige	B917212
COR3	translúcido	B917312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
VITA OMEGA 900 Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Wash Opaque, Translucent T4, Window	B263
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T9, WIN, OT1-OT3, CE1-CE3	B272T
Guía de colores NUANCE	NU1-NU10, COR1-COR3, G1, G2	B272NU
Guía de colores LUMINARY	LM1-LM7, MARN, MAR1-MAR6	B272LM
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA OMEGA 900 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA MODELLING LIQUID 30 M	Líquido de modelado para modelado de larga duración	50 ml	B30M50
VITA MODELLING LIQUID 30 M	Líquido de modelado para modelado de larga duración	250 ml	B30M250
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	50 ml	BSMF50
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	250 ml	BSMF250
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	50 ml	BME50
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	250 ml	BME250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaques y los opaques de color	50 ml	B09G50
VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaques y los opaques de color	250 ml	B09G250

Surtidos VITA OMEGA 900

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA OMEGA 900 STANDARD SET 12

Ref. B09SET12N *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	OPAQUE DENTINE A1-D4
16	12 g	DENTINE A1-D4
5	12 g	ENAMEL EN1-EN5
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID
1	12 g	VITA MODELLING FLUID
1	envase	Soportes de cocción A+B
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	Indicador de color
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B09SET12PON)

VITA PROFESSIONAL KIT

Ref. B09PKITN

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	TRANSLUCENT T1, T2, T5, T6, T8, T9
3	12 g	OPAL TRANSLUCENT OT1-OT3
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
7	12 g	LUMINARY LM1-LM7
10	9 g	NUANCE NU1-NU10
2	12 g	GINGIVA G1, G2
3	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
7	12 g	MARGIN MARN-MAR6
1	unidad	Guía de colores TRANSLUCENT
1	unidad	Guía de colores NUANCE
1	unidad	Guía de colores LUMINARY
		Instrucciones de uso

VITA STARTER KIT A3

Ref. B09KITSA3 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE A3
1	12 g	OPAQUE DENTINE A3
1	12 g	DENTINE A3
1	12 g	ENAMEL EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B09KITSAP3O)

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA OMEGA 900	Instrucciones de uso	906
VITA OMEGA 900 HIGH CHROMA OPAQUE DENTINE	Instrucciones de uso	1038M
Indicador de color		
VITA OMEGA 900 3D-MASTER	Bloc de hojas de pedido	838M
VITA OMEGA 900 classical	Bloc de hojas de pedido	843M

Productos VITA OMEGA 900

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA OMEGA 900 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B900012	B900050

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 PASTE WASH OPAQUE, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
WO	B92007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA OMEGA 900 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B900112	B900150
A2	B900212	B900250
A3	B900312	B900350
A3.5	B900412	B900450
A4	B900512	B900550
B1	B900612	B900650
B2	B900712	B900750
B3	B900812	B900850
B4	B900912	B900950
C1	B901012	B901050
C2	B901112	B901150
C3	B901212	B901250
C4	B901312	B901350
D2	B901412	B901450
D3	B901512	B901550
D4	B901612	B901650

VITA OMEGA 900 PASTE OPAQUE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
A1	B92015
A2	B92025
A3	B92035
A3.5	B92045
A4	B92055
B1	B92065
B2	B92075
B3	B92085
B4	B92095
C1	B92105
C2	B92115
C3	B92125
C4	B92135
D2	B92145
D3	B92155
D4	B92165

VITA OMEGA 900 OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B903112	B903150	EN2
A2	B903212	B903250	EN2
A3	B903312	B903350	EN2
A3.5	B903412	B903450	EN4
A4	B903512	B903550	EN4
B1	B903612	B903650	EN1
B2	B903712	B903750	EN1
B3	B903812	B903850	EN2
B4	B903912	B903950	EN2
C1	B904012	B904050	EN2
C2	B904112	B904150	EN2
C3	B904212	B904250	EN2
C4	B904312	B904350	EN3
D2	B904412	B904450	EN2
D3	B904512	B904550	EN4
D4	B904612	B904650	EN4

VITA OMEGA 900 DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
A1	B905112	B905150	-	EN2
A2	B905212	B905250	B9052250	EN2
A3	B905312	B905350	B9053250	EN2
A3.5	B905412	B905450	B9054250	EN4
A4	B905512	B905550	-	EN4
B1	B905612	B905650	-	EN1
B2	B905712	B905750	-	EN1
B3	B905812	B905850	B9058250	EN2
B4	B905912	B905950	-	EN2
C1	B906012	B906050	-	EN2
C2	B906112	B906150	-	EN2
C3	B906212	B906250	-	EN2
C4	B906312	B906350	-	EN3
D2	B906412	B906450	-	EN2
D3	B906512	B906550	-	EN4
D4	B906612	B906650	-	EN4

VITA OMEGA 900 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B907112	B907150	-
EN2	B907212	B907250	B9072250
EN3	B907312	B907350	-
EN4	B907412	B907450	B9074250
EN5	B907512	B907550	-

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA OMEGA 900 3D-MASTER

VITA OMEGA 900 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Wash Opaque, Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window	B283
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T9, WIN, OT1-OT3, CE1-CE3	B272T
Guía de colores NUANCE	NU1-NU10, COR1-COR3, G1, G2	B272LM
Guía de colores LUMINARY	LM1-LM7, MARN, MAR1-MAR6	B272NU
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA MODELLING LIQUID 30 M	Líquido de modelado para modelado de larga duración	50 ml	B30M50
VITA MODELLING LIQUID 30 M	Líquido de modelado para modelado de larga duración	250 ml	B30M250
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	50 ml	BSMF50
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	250 ml	BSMF250
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	50 ml	BME50
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	250 ml	BME250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquers y los opaquers de color	50 ml	B09G50
VITA OMEGA 900 OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquers y los opaquers de color	250 ml	B09G250

VITA VMK® 95



Descripción del producto

VITA VMK 95 es una metalocerámica para el recubrimiento de aleaciones de cocción con elevado contenido en oro, con contenido reducido en metales nobles, con plata y sin metales nobles.

Encontrará información más detallada sobre combinaciones ya probadas con éxito por VITA en nuestra lista de aleaciones (documento nº 707M).

El surtido racionalizado, compacto y claro permite reproducir con precisión y matices cálidos los colores de la guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER incluso en la estratificación estándar con dos capas (dentina y esmalte).

Surtidos VITA VMK® 95

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VMK 95 STANDARD SET 12

Ref. B95SET123D *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
26	12 g	OPAQUE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	ENAMEL EN2, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	envase	Soportes de cocción A+B
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	Indicador del color
2	unidades	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95SET12PO3D)



VITA VMK 95 PASTE OPAQUE SET

Ref. B95POSET3D

Cantidad	Contenido	Material
1	7 g	PASTE WASH OPAQUE WO
26	5 g	PASTE OPAQUE 1M1-5M3
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1	unidad	Espátula de amasar
1	unidad	Pincel plano
		Instrucciones de uso



VITA VMK 95 OPAQUE DENTINE SET

Ref. B95ODSET3D

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	OPAQUE DENTINE 1M1-5M3
		Instrucciones de uso





VITA VMK 95 STARTER KIT 3M2

Ref. B95KITS3M2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE 3M2
1	12 g	DENTINE 3M2
1	12 g	ENAMEL EN2
1	12 g	NECK N3
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95KITS3M2PO)



VITA VMK 95 ADDITIONAL SET

Ref. B95ASETN *

Cantidad	Contenido	Material
3	12 g	TRANSLUCENT T1, T2, T5
4	12 g	DENTINE MODIFIER DM2, DM4, DM6, DM7
7	12 g	MARGIN MARN, MAR1-MAR6
2	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2
1	12 g	CERVICAL CE3
2	12 g	GINGIVA G1, G2
2	unidades	Guías de colores
		Instrucciones de uso

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical



VITA VMK 95 MARGIN KIT

Ref. B95MKIT *

Cantidad	Contenido	Material
7	12 g	MARGIN MARN, MAR1-MAR6
1	unidad	Guía de colores
		Instrucciones de uso

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical

VITA VMK 95 10-COLOR-SET

Ref. B9510CSET3D *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
10	12 g	OPAQUE **
10	12 g	DENTINE **
3	12 g	NECK N2-N4
2	12 g	ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso



* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B9510CSETPO3D)

** En los siguientes colores: 2L2.5, 2M2, 2M3, 2R2.5, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VMK 95	Instrucciones de uso	905
VITA VMK 95 3D-MASTER	Bloc de hojas de pedido	840M

Productos VITA VMK® 95

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VMK 95 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B300012	B300050

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 PASTE WASH OPAQUE, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
WO	B32007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
1M1	B330112	B330150
1M2	B330212	B330250
2L1.5	B330312	B330350
2L2.5	B330412	B330450
2M1	B330512	B330550
2M2	B330612	B330650
2M3	B330712	B330750
2R1.5	B330812	B330850
2R2.5	B330912	B330950
3L1.5	B331012	B331050
3L2.5	B331112	B331150
3M1	B331212	B331250
3M2	B331312	B331350
3M3	B331412	B331450
3R1.5	B331512	B331550
3R2.5	B331612	B331650
4L1.5	B331712	B331750
4L2.5	B331812	B331850
4M1	B331912	B331950
4M2	B332012	B332050
4M3	B332112	B332150
4R1.5	B332212	B332250
4R2.5	B332312	B332350
5M1	B332412	B332450
5M2	B332512	B332550
5M3	B332612	B332650

VITA VMK 95 PASTE OPAQUE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
1M1	B34015
1M2	B34025
2L1.5	B34035
2L2.5	B34045
2M1	B34055
2M2	B34065
2M3	B34075
2R1.5	B34085
2R2.5	B34095
3L1.5	B34105
3L2.5	B34115
3M1	B34125
3M2	B34135
3M3	B34145
3R1.5	B34155
3R2.5	B34165
4L1.5	B34175
4L2.5	B34185
4M1	B34195
4M2	B34205
4M3	B34215
4R1.5	B34225
4R2.5	B34235
5M1	B34245
5M2	B34255
5M3	B34265

VITA VMK 95 OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
1M1	B333112	B333150	EN2
1M2	B333212	B333250	EN2
2L1.5	B333312	B333350	EN2
2L2.5	B333412	B333450	EN2
2M1	B333512	B333550	EN2
2M2	B333612	B333650	EN2
2M3	B333712	B333750	EN2
2R1.5	B333812	B333850	EN2
2R2.5	B333912	B333950	EN2
3L1.5	B334012	B334050	EN2
3L2.5	B334112	B334150	EN2
3M1	B334212	B334250	EN2
3M2	B334312	B334350	EN2
3M3	B334412	B334450	EN2
3R1.5	B334512	B334550	EN2
3R2.5	B334612	B334650	EN3
4L1.5	B334712	B334750	EN2
4L2.5	B334812	B334850	EN2
4M1	B334912	B334950	EN2
4M2	B335012	B335050	EN3
4M3	B335112	B335150	EN3
4R1.5	B335212	B335250	EN2
4R2.5	B335312	B335350	EN3
5M1	B335412	B335450	EN2
5M2	B335512	B335550	EN3
5M3	B335612	B335650	EN3

VITA VMK 95 DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
1M1	B336112	B336150	EN2
1M2	B336212	B336250	EN2
2L1.5	B336312	B336350	EN2
2L2.5	B336412	B336450	EN2
2M1	B336512	B336550	EN2
2M2	B336612	B336650	EN2
2M3	B336712	B336750	EN2
2R1.5	B336812	B336850	EN2
2R2.5	B336912	B336950	EN2
3L1.5	B337012	B337050	EN2
3L2.5	B337112	B337150	EN2
3M1	B337212	B337250	EN2
3M2	B337312	B337350	EN2
3M3	B337412	B337450	EN2
3R1.5	B337512	B337550	EN2
3R2.5	B337612	B337650	EN3
4L1.5	B337712	B337750	EN2
4L2.5	B337812	B337850	EN2
4M1	B337912	B337950	EN2
4M2	B338012	B338050	EN3
4M3	B338112	B338150	EN3
4R1.5	B338212	B338250	EN2
4R2.5	B338312	B338350	EN3
5M1	B338412	B338450	EN2
5M2	B338512	B338550	EN3
5M3	B338612	B338650	EN3

VITA VMK 95 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B307112	B307150	-
EN2	B307212	B307250	B3072250
EN3	B307312	B307350	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 WINDOW, 12 g / 50 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WIN	Material transparente	B312212	B312250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 COLOR OPAQUE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
C03	blanco	B302312
C06	rosa fucsia	B302612
C07	marrón claro	B302712

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 PASTE COLOR OPAQUE, 5 g *

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
C03	blanco	B32235
C06	rosa fucsia	B32265
C07	marrón claro	B32275

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 GINGIVA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rojo claro	B314112
G2	rojo oscuro	B314212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 MARGIN, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MARN	blanco	B360012
MAR1	beige claro	B360112
MAR2	beige oscuro	B360212
MAR3	beige amarillento claro	B360312
MAR4	beige amarillento	B360412
MAR5	marrón anaranjado	B360512
MAR6	beige pardusco	B360612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 DENTINE MODIFIER, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
DM2	amarillo oscuro	B313212
DM4	amarillo ocre	B313412
DM6	marrón rojizo	B313612
DM7	rosa	B313712

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 CERVICAL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CE3	dorado	B309312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 NECK, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
N1	B357112
N2	B357212
N3	B357312
N4	B357412
N5	B357512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical

VITA VMK 95 TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
T1	blanquecino translúcido	B308112	B308150	-
T2	amarillento translúcido	B308212	B308250	-
T4	neutro translúcido	B308412	B308450	B3084250
T5	azulado translúcido	B308512	B308550	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 CORRECTIVE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	incisal	B318112
COR2	body	B318212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador del color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Neck, Wash Opaque, Translucent, WIN	B262
Guía de colores TRANSLUCENT	T1, T2, T4, T5, WIN, CE3, COR1, COR2, DM2, DM4, DM6, DM7	B275T
Guía de colores MARGIN	MARN, MAR1 - MAR6, G1, G2	B275M
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VMK 95 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA MODELLING LIQUID 30 M	Líquido de modelado para modelado de larga duración	50 ml	B30M50
VITA MODELLING LIQUID 30 M	Líquido de modelado para modelado de larga duración	250 ml	B30M250
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	50 ml	BSMF50
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	250 ml	BSMF250
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	50 ml	BME50
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	250 ml	BME250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquers y los opaquers de color	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquers y los opaquers de color	250 ml	BOF250

Surtidos VITA VMK® 95

Colores VITAPAN®classical

VITA VMK 95 STANDARD SET 12 con opáquer en polvo */ ** Ref. B95SET12F

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	DENTINE A1-D4
4	12 g	NECK NA-ND
2	12 g	ENAMEL EN1, EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	Indicador de color
		Instrucciones de uso

* también disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95SET12POF)

** también disponible en 50 g como surtido con opáquer en polvo (Ref. B95SET50F) o con PASTE OPAQUE (Ref. B95SET50POF).

VITA VMK 95 PASTE OPAQUE SET Ref. B95POSETM

Cantidad	Contenido	Material
1	7 g	PASTE WASH OPAQUE
16	5 g	PASTE OPAQUE
1	15 ml	PASTE OPAQUE LIQUID
1	unidad	Pincel plano
1	unidad	Espátula de amasar/
		Instrucciones de uso

VITA VMK 95 6-COLOR-SET Ref. B95CSETF *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
6	12 g	OPAQUE A1, A3, A3.5, B2, B3, D3
6	12 g	DENTINE A1, A3, A3.5, B2, B3, D3
2	12 g	ENAMEL EN1, EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	Indicador del color
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95CSET12POF)

VITA VMK 95 OPAQUE DENTINE SET Ref. B95ODSETN

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	OPAQUE DENTINE
		Instrucciones de uso

VITA VMK 95 ADDITIONAL SET Ref. B95ASETN

Cantidad	Contenido	Material
3	12 g	TRANSLUCENT T1, T2, T5
4	12 g	DENTINE MODIFIER DM2, DM4, DM6, DM7
7	12 g	MARGIN MARN, MAR1-MAR6
2	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2
1	12 g	CERVICAL CE3
2	12 g	GINGIVA G1, G2
2	unidades	Guías de colores
		Instrucciones de uso

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical

VITA VMK 95 STARTER KIT A2 Ref. B95KITSA2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE A2
1	12 g	DENTINE A2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95KITSA2PO)

VITA VMK 95 STARTER KIT A3

Ref. B95KITSA3 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE A3
1	12 g	DENTINE A3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95KITSA3PO)

VITA VMK 95 STARTER KIT A3,5

Ref. B95KITSA35 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE A3,5
1	12 g	DENTINE A3,5
1	12 g	ENAMEL EN2
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
		Instrucciones de uso

* También disponible con PASTE OPAQUE (Ref. B95KITSA35PO)

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VMK 95	Instrucciones de uso	905
VITA VMK 95 classical	Bloc de hojas de pedido	849

Productos VITA VMK® 95

Colores VITAPAN®classical A1-D4

VITA VMK 95 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B300012	B300050

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 PASTE WASH OPAQUE, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
WO	B32007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B300112	B300150
A2	B300212	B300250
A3	B300312	B300350
A3.5	B300412	B300450
A4	B300512	B300550
B1	B300612	B300650
B2	B300712	B300750
B3	B300812	B300850
B4	B300912	B300950
C1	B301012	B301050
C2	B301112	B301150
C3	B301212	B301250
C4	B301312	B301350
D2	B301412	B301450
D3	B301512	B301550
D4	B301612	B301650

VITA VMK 95 PASTE OPAQUE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
A1	B32015
A2	B32025
A3	B32035
A3.5	B32045
A4	B32055
B1	B32065
B2	B32075
B3	B32085
B4	B32095
C1	B32105
C2	B32115
C3	B32125
C4	B32135
D2	B32145
D3	B32155
D4	B32165

VITA VMK 95 OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B303112	B303150	EN1
A2	B303212	B303250	EN1
A3	B303312	B303350	EN1
A3.5	B303412	B303450	EN2
A4	B303512	B303550	EN2
B1	B303612	B303650	EN2
B2	B303712	B303750	EN2
B3	B303812	B303850	EN2
B4	B303912	B303950	EN2
C1	B304012	B304050	EN2
C2	B304112	B304150	EN2
C3	B304212	B304250	EN1
C4	B304312	B304350	EN1
D2	B304412	B304450	EN2
D3	B304512	B304550	EN2
D4	B304612	B304650	EN2

VITA VMK 95 DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
A1	B305112	B305150	-	EN1
A2	B305212	B305250	B3052250	EN1
A3	B305312	B305350	B3053250	EN1
A3.5	B305412	B305450	B3054250	EN2
A4	B305512	B305550	-	EN2
B1	B305612	B305650	-	EN2
B2	B305712	B305750	-	EN2
B3	B305812	B305850	B3058250	EN2
B4	B305912	B305950	-	EN2
C1	B306012	B306050	-	EN2
C2	B306112	B306150	-	EN2
C3	B306212	B306250	-	EN1
C4	B306313	B306350	-	EN1
D2	B306412	B306450	-	EN2
D3	B306512	B306550	-	EN2
D4	B306612	B306650	-	EN2

VITA VMK 95 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B307112	B307150	B3071250
EN2	B307212	B307250	B3072250
EN3	B307312	B307350	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VMK 95 NECK, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
NA	B317112
NB	B317212
NC	B317312
ND	B317412

Para más polvos (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA VMK 95 3D-MASTER

VITA VMK 95 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador del color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Neck, Wash Opaque, Translucent, WIN	B287
Guía de colores TRANSLUCENT	T1, T2, T4, T5, WIN, CE3, COR1, COR2, DM2, DM4, DM6, DM7	B275T
Guía de colores MARGIN	MARN, MAR1-MAR6, G1, G2	B275M
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VMK 95 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA MODELLING LIQUID "30M"	Líquido de modelado para modelado de larga duración	50 ml	B30M50
VITA MODELLING LIQUID "30M"	Líquido de modelado para modelado de larga duración	250 ml	B30M250
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	50 ml	BSMF50
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	250 ml	BSMF250
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	50 ml	BME50
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	250 ml	BME250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaques y los opaques de color	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaques y los opaques de color	250 ml	BOF250

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VMK 95	Instrucciones de uso	905
VITA VMK 95 3D-MASTER	Bloc de hojas de pedido	840M

VITA TITANKERAMIK



Descripción del producto

El coeficiente de expansión térmica (CET) y las propiedades físicas de VITA TITANKERAMIK están ajustados exactamente al titanio.

Gracias a la composición óptima de los materiales, el protésico dental obtiene colores brillantes en el sistema Vita 3D-Master. Los materiales complementarios del Master Kit ofrecen todas las posibilidades para alcanzar unos resultados estéticamente atractivos.

Productos VITA TITANKERAMIK

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA TITANKERAMIK BONDER, 7.5 g *

Denominación	Ref. 7.5 g
BON	B200075

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
BON	B22007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK OPAQUE, 12 g / 50 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g **
OP1	B2501012	-
OP2	B2502012	-
OP3	B2503012	-
OP4	B2504012	B2504050
OP5	B2505012	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

** Producto descatálogo, sólo hasta fin de existencias

VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g	Asignación del esmalte
1M1	B233112	EN2
1M2	B233212	EN2
2L1.5	B233312	EN2
2L2.5	B233412	EN2
2M1	B233512	EN2
2M2	B233612	EN2
2M3	B233712	EN2
2R1.5	B233812	EN2
2R2.5	B233912	EN2
3L1.5	B234012	EN2
3L2.5	B234112	EN2
3M1	B234212	EN2
3M2	B234312	EN2
3M3	B234412	EN2
3R1.5	B234512	EN2
3R2.5	B234612	EN2
4L1.5	B234712	EN4
4L2.5	B234812	EN4
4M1	B234912	EN4
4M2	B235012	EN4
4M3	B235112	EN4
4R1.5	B235212	EN4
4R2.5	B235312	EN4
5M1	B235412	EN4
5M2	B235512	EN4
5M3	B235612	EN4

VITA TITANKERAMIK DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g *	Asignación del esmalte
1M1	B236112	-	EN2
1M2	B236212	-	EN2
2L1.5	B236312	-	EN2
2L2.5	B236412	-	EN2
2M1	B236512	B236550	EN2
2M2	B236612	-	EN2
2M3	B236712	B236750	EN2
2R1.5	B236812	-	EN2
2R2.5	B236912	B236950	EN2
3L1.5	B237012	-	EN2
3L2.5	B237112	-	EN2
3M1	B237212	-	EN2
3M2	B237312	-	EN2
3M3	B237412	-	EN2
3R1.5	B237512	-	EN2
3R2.5	B237612	-	EN2
4L1.5	B237712	-	EN4
4L2.5	B237812	-	EN4
4M1	B237912	-	EN4
4M2	B238012	-	EN4
4M3	B238112	-	EN4
4R1.5	B238212	-	EN4
4R2.5	B238312	-	EN4
5M1	B238412	-	EN4
5M2	B238512	-	EN4
5M3	B238612	-	EN4

* Producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias

VITA TITANKERAMIK ENAMEL, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EN2	B207212
EN4	B207412

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK WINDOW, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
WIN	Material transparente	B212212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical

VITA TITANKERAMIK COLOR OPAQUE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CO1	marrón grisáceo	B202112
CO2	ocre	B202212
CO3	blanco	B202312
CO4	lila	B202412
CO5	gris	B202512
CO6	rosa	B202612
CO7	marrón claro	B202712
CO8	marrón oscuro	B202812

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK GINGIVA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa claro	B214112
G2	rosa oscuro	B214212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK MARGIN, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MARN	blanco	B260012
MAR1	beige claro	B260112
MAR2	beige oscuro	B260212
MAR3	beige amarillento claro	B260312
MAR4	beige amarillento	B260412
MAR5	marrón anaranjado	B260512
MAR6	beige pardusco	B260612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK CERVICAL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CE1	naranja claro	B209112
CE2	amarillo claro	B209212
CE3	amarillo dorado	B209312
CE4	neutro	B209412

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g
T1	blanquecino translúcido	B208112	-
T2	amarillento translúcido	B208212	-
T3	naranja translúcido	B208312	-
T4	neutro translúcido	B208412	B208450
T5	azul claro translúcido	B208512	-
T6	azul translúcido	B208612	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK INTENSIVE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
IN1	beige arena	B211112
IN2	beige amarillento	B211212
IN3	amarillo trigo	B211312
IN4	amarillo claro	B211412
IN5	ocre	B211512
IN6	naranja	B211612
IN7	naranja llama	B211712
IN8	gris pardusco	B211812
IN9	azul grisáceo	B211912
IN10	blanco	B212012

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window	B264
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T6, WIN, CE1-CE4	B274T
Guía de colores MARGIN	MARN, MAR1-MAR6, C01-C08	B274M
Guía de colores INTENSIVE	IN1-IN10, G1-G2	B274IN
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA TITANKERAMIK Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA MODELLING LIQUID "30 M"	Líquido de modelado para modelado de larga duración	50 ml	B30M50
VITA MODELLING LIQUID "30 M"	Líquido de modelado para modelado de larga duración	250 ml	B30M250
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	50 ml	BSMF50
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	250 ml	BSMF250
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	50 ml	BME50
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	250 ml	BME250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaques y los opaques de color	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaques y los opaques de color	250 ml	BOF250

Productos VITA TITANKERAMIK

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK BONDER, 7,5 g *

Denominación	Ref. 7,5 g
BON	B200075

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
BON	B22007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g *
A1	B200112	-
A2	B200212	-
A3	B200312	-
A3.5	B200412	-
A4	B200512	-
B1	B200612	-
B2	B200712	-
B3	B200812	B200850
B4	B200912	-
C1	B201012	-
C2	B201112	-
C3	B201212	-
C4	B201312	-
D2	B201412	-
D3	B201512	B201550
D4	B201612	-

* Producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias

VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g	Asignación del esmalte
A1	B203112	EN2
A2	B203212	EN2
A3	B203312	EN2
A3.5	B203412	EN4
A4	B203512	EN4
B1	B203612	EN1
B2	B203712	EN1
B3	B203812	EN2
B4	B203912	EN2
C1	B204012	EN2
C2	B204112	EN2
C3	B204212	EN2
C4	B204312	EN3
D2	B204412	EN2
D3	B204512	EN4
D4	B204612	EN4

VITA TITANKERAMIK DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g *	Asignación del esmalte
A1	B205112	-	EN2
A2	B205212	-	EN2
A3	B205312	-	EN2
A3.5	B205412	-	EN4
A4	B205512	-	EN4
B1	B205612	B205650	EN1
B2	B205712	-	EN1
B3	B205812	B205850	EN2
B4	B205912	-	EN2
C1	B206012	-	EN2
C2	B206112	B206150	EN2
C3	B206212	B206250	EN2
C4	B206312	-	EN3
D2	B206412	-	EN2
D3	B206512	-	EN4
D4	B206612	-	EN4

* Producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias

VITA TITANKERAMIK ENAMEL, 12 g *

Denominación	Ref. 12 g
EN1	B207112
EN2	B207212
EN3	B207312
EN4	B207412

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA TITANKERAMIK 3D-MASTER

VITA TITANKERAMIK Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window	B288
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T6, WIN, CE1-CE4	B274T
Guía de colores MARGIN	MARN, MAR1-MAR6, C01-C08	B274M
Guía de colores INTENSIVE	IN1-IN10, G1-G2	B274IN
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA TITANKERAMIK Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA MODELLING LIQUID "30 M"	Líquido de modelado para modelado de larga duración	50 ml	B30M50
VITA MODELLING LIQUID "30 M"	Líquido de modelado para modelado de larga duración	250 ml	B30M250
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	50 ml	BSMF50
VITA SPECIAL MODELLING FLUID	Líquido de modelado para una facilidad de aplicación y una estabilidad óptimas	250 ml	BSMF250
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	50 ml	BME50
VITA MODELLING LIQUID EXTRA	Líquido de modelado para mejorar la subcocción no deseada	250 ml	BME250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquers y los opaquers de color	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquers y los opaquers de color	250 ml	BOF250

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA TITANKERAMIK	Instrucciones de uso	858
VITA TITANKERAMIK 3D-MASTER	Bloc de hojas de pedido	883M
VITA TITANKERAMIK classical	Bloc de hojas de pedido	882M

VITAVM®7

Cerámica de estructura fina para materiales de estructura de cerámica sin metal con un CET entre 7,2 y 7,9.



Descripción del producto

VITA VM 7 se ha desarrollado como cerámica especial de recubrimiento con estructura fina para materiales de estructura de cerámica sin metal con un valor CET situado entre 7,2 y 7,9 (p. ej. VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL, ZIRCONIA, así como para los VITA In-Ceram AL).

Al igual que todos los materiales de la gama VITAVM, VITAVM 7 se caracteriza por un comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte. Los materiales complementarios fluorescentes y opalescentes permiten conseguir resultados muy personalizados y de alto valor estético.

Un estudio, realizado por Giordano en la Goldman School of Dental Medicine de la Universidad de Boston, comparó la abrasión de diferentes materiales cerámicos con la del esmalte dental natural.

En este estudio, VITA VM 7 obtuvo los mejores resultados de todas las cerámicas examinadas, con unos valores casi idénticos a los del esmalte natural, gracias a su estructura fina. Esto demuestra que VITA VM 7 es uno de los materiales que menos dañan los antagonistas.

Ventajas

- propiedades de manipulación óptimas, tales como la estabilidad y la facilidad de modelado
- excelente facilidad de tallado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada en la boca
- superficies homogéneas y lisas
- similitud con el esmalte demostrada
- resultados estéticos convincentes
- oferta compacta de materiales complementarios para personalizar las prótesis
- compatible con los materiales VITA AKZENT y VITA INTERNO

VITAVM[®]7 Surtidos

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

VITA VM 7 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV7BK12N *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
3	12 g	CHROMA PLUS CP2, CP3, CP4
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	EFFECT LINER EL2, EL3, EL4
3	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2, COR3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	paquete	Bases de cocción G
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Lápiz VITA MODISOL
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL (Ref. BV7BKS12N) en los siguientes colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, CP2-CP4, ENL, END, NT, WIN, EL2-EL4, COR1



VITA VM 7 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV7BUK12 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
		Instrucciones de uso

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL (Ref. BV7BUKS12) en los 15 colores siguientes: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3



VITA VM 7 BLEACHED COLOR KIT

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

Ref. BV7BLK

Cantidad	Contenido	Material
3	12 g	BASE DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
1	12 g	ENAMEL LIGHT ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	12 g	EFFECT LINER EL1
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE Shade Group 0M
		Instrucciones de uso





VITA VM 7 ONE COLOR KIT 3M2
 Surtido monocromo para las primeras pruebas
 Ref. BV7OCK3M2

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	BASE DENTINE 3M2
1	12 g	TRANSPA DENTINE 3M2
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINWOW WIN
1	12 g	EFFECT LINER EL4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	Varillas de colores 3M2
		Instrucciones de uso



VITA VM 7 PROFESSIONAL KIT
 Para añadir efectos y características naturales
 Ref. BV7PK *

Cantidad	Contenido	Material
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 g	MAMELON MM1-MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1-EP3
3	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO3
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
2	12 g	EFFECT LINER EL5, EL6
1	unidad	Guía de colores EFFECT ENAMEL
1	unidad	Guía de colores EFFECT CHROMA
1	unidad	Guía de colores EFFECT LINER
		Instrucciones de uso

* También disponible como PROFESSIONAL KIT SMALL (Ref. BV7PKS) en los siguientes 15 colores: EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11



VITA VM 7 GINGIVA KIT
 Materiales gingivales de aspecto natural
 Ref. BV7GK

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
1	unidad	Guía de colores GINGIVA
		Instrucciones de uso

VITA VM 7 MARGIN KIT

Sólo para pequeñas correcciones en la zona marginal
Ref. BV7MK

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	unidad	Guía de colores MARGIN
		Instrucciones de uso



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM 7	Instrucciones de uso	1110
VITA VM 7	Bloc de hojas de pedido	1117M
VITA VM 7	Encarte	1226
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
VITA VM	Carpeta de imagen completa	1284
Cerámica de recubrimiento totalmente vítrea de dos fases	Separata	1177
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)



Productos VITAVM®7

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 7 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4103112	-	ENL
0M2	B4103212	-	ENL
0M3	B4103312	-	ENL
1M1	B4103412	B4103450	ENL
1M2	B4103512	B4103550	ENL
2L1.5	B4103612	-	ENL
2L2.5	B4103712	-	ENL
2M1	B4103812	B4103850	ENL
2M2	B4103912	B4103950	ENL
2M3	B4104012	B4104050	ENL
2R1.5	B4104112	-	ENL
2R2.5	B4104212	-	ENL
3L1.5	B4104312	B4104350	ENL
3L2.5	B4104412	B4104450	ENL
3M1	B4104512	B4104550	ENL
3M2	B4104612	B4104650	ENL
3M3	B4104712	B4104750	ENL
3R1.5	B4104812	B4104850	ENL
3R2.5	B4104912	B4104950	ENL
4L1.5	B4105012	-	END
4L2.5	B4105112	-	END
4M1	B4105212	B4105250	END
4M2	B4105312	B4105350	END
4M3	B4105412	B4105450	END
4R1.5	B4105512	-	END
4R2.5	B4105612	-	END
5M1	B4105712	-	END
5M2	B4105812	-	END
5M3	B4105912	-	END

VITA VM 7 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4106112	-	ENL
0M2	B4106212	-	ENL
0M3	B4106312	-	ENL
1M1	B4106412	B4106450	ENL
1M2	B4106512	B4106550	ENL
2L1.5	B4106612	-	ENL
2L2.5	B4106712	-	ENL
2M1	B4106812	B4106850	ENL
2M2	B4106912	B4106950	ENL
2M3	B4107012	B4107050	ENL
2R1.5	B4107112	-	ENL
2R2.5	B4107212	-	ENL
3L1.5	B4107312	B4107350	ENL
3L2.5	B4107412	B4107450	ENL
3M1	B4107512	B4107550	ENL
3M2	B4107612	B4107650	ENL
3M3	B4107712	B4107750	ENL
3R1.5	B4107812	B4107850	ENL
3R2.5	B4107912	B4107950	ENL
4L1.5	B4108012	-	END
4L2.5	B4108112	-	END
4M1	B4108212	B4108250	END
4M2	B4108312	B4108350	END
4M3	B4108412	B4108450	END
4R1.5	B4108512	-	END
4R2.5	B4108612	-	END
5M1	B4108712	-	END
5M2	B4108812	-	END
5M3	B4108912	-	END

VITA VM 7 ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
ENL	B4119112	B4119150
END	B4119212	B4119250

VITA VM 7 NEUTRAL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
NT	B4120112	B4120150

VITA VM 7 WINDOW, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WIN	B4118112	B4118150

VITA VM 7 GINGIVA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4123112
G2	rosa anaranjado	B4123212
G3	rosa	B4123312
G4	rojo pardusco	B4123412
G5	negro rojizo	B4123515

VITA VM 7 MARGIN, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
M1	blanco	B4126112
M4	amarillo	B4126412
M5	ámbar	B4126512
M7	beige claro	B4126712
M8	marrón pastel	B4126812
M9	naranja claro	B4126912

VITA VM 7 EFFECT LINER, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EL1	blanco	B4114112
EL2	beige	B4114212
EL3	marrón	B4114312
EL4	amarillo	B4114412
EL5	naranja	B4114512
EL6	amarillo verdoso	B4114612

VITA VM 7 CHROMA PLUS, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CP2	beige amarillento	B4124212
CP3	marrón anaranjado claro	B4124312
CP4	marrón anaranjado	B4124412

VITA VM 7 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EC1	para efectos blanquecinos	B4112112
EC2	beige arena	B4112212
EC3	amarillo claro	B4112312
EC4	amarillo limón pálido	B4112412
EC5	naranja claro	B4112512
EC6	naranja	B4112612
EC7	rosa	B4112712
EC8	beige pardusco	B4112812
EC9	marrón	B4112912
EC10	marrón verdoso	B4113012
EC11	gris verdoso	B4113112

VITA VM 7 MAMELON, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MM1	beige	B4116112
MM2	marrón amarillento cálido	B4116212
MM3	naranja pálido	B4116312

VITA VM 7 EFFECT ENAMEL 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EE1	blanquecino	B4109112
EE2	blanquecino translúcido	B4109212
EE3	rosa translúcido	B4109312
EE4	amarillento	B4109412
EE5	amarillento translúcido	B4109512
EE6	rojizo translúcido	B4109612
EE7	naranja translúcido	B4109712
EE8	rojo translúcido	B4109812
EE9	azulado translúcido	B4109912
EE10	azul	B4110012
EE11	gris	B4110112

VITA VM 7 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
E01	neutro	B4117112
E02	blanquecino	B4117212
E03	azulado	B4117312

VITA VM7 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EP1	amarillo pastel	B4115112
EP2	naranja pastel	B4115212
EP3	rosa pastel	B4115312

VITA VM 7 CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4122112
COR2	beige	B4122212
COR3	marrón	B4122312

VITA VM 7 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective	B310
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1-EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, E01-E03, EP1-EP3, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1-EE11	B416
Guía de colores GINGIVA	G1-G5	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VM 7 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BML250N

VITAVM®9

Cerámica de estructura fina para materiales de estructura de cerámica sin metal con un CET de aproximadamente 10,5.



Descripción del producto

VITA VM 9 ha sido concebido especialmente como cerámica de recubrimiento de estructura fina para estructuras de ZrO_2 estabilizadas parcialmente con itrio, con un valor CET de aprox. 10,5 (p. ej. VITA In-Ceram YZ).

Gracias a la adaptación precisa del CET a los materiales de dióxido de circonio se obtienen una unión óptima y resultados seguros.

Además, VITA VM 9 es idónea para la personalización de: VITABLOCS Mark VITA PM 9 (restauraciones confeccionadas con tecnología de prensado)

Al igual que todos los materiales de la gama VITA VM, VITA VM 9 se caracteriza por un comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte.

Los materiales complementarios VITA VM permiten reproducir fácilmente todas las características individuales.

Ventajas

- propiedades de manipulación óptimas, tales como la estabilidad y la facilidad de modelado
- Excelente unión para obtener resultados seguros
- Propiedades de manipulación óptimas, tales como la excelente estabilidad, mínima tendencia a la contracción y elevada estabilidad de los cantos
- Extraordinaria estabilidad de cocción, incluso tras varias cocciones
- Excelente facilidad de desbastado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada en la boca
- Superficies homogéneas y lisas
- Elevada similitud con el esmalte demostrada
- Oferta coordinada de materiales complementarios para personalizar las prótesis
- Compatible con los materiales VITA Akzent y VITA Interno
- Disponible en VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4
-
-

VITAVM®9 Surtidos

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 9 EFFECT BONDER KIT

Necesario para una reproducción del color segura en caso de estructuras de óxido de circonio no coloreadas

Ref. BV9EB12 * / **

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	EFFECT BONDER EBO-EB5
1	50 ml	VITA VM 9 EFFECT BONDER FLUID
		Instrucciones de uso

* También disponible con EFFECT BONDER PASTE (Ref. BV9EB12P)

** Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4



VITA VM 9 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV9BK12V1 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
3	12 g	CROMA PLUS CP2, CP3, CP4
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2, COR3
1	unidad	Lápiz VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	paquete	Bases de cocción G
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL (Ref. BV9BK12V1) en los siguientes colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, CP2-CP4, ENL, NT, WIN, COR1



VITA VM 9 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV9BUK12 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL (Ref. BV9BUK12) en los siguientes 15 colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3





VITA VM 9 BLEACHED COLOR KIT

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

Ref. BV9BLKV1

Cantidad	Contenido	Material
3	12 g	BASE DENTINE OM1, OM2, OM3
3	12 g	TRANSPA DENTINE OM1, OM2, OM3
1	12 g	ENAMEL LIGHT ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE Shade Group OM
		Instrucciones de uso



VITA VM 9 PROFESSIONAL KIT

Para añadir efectos y características naturales

Ref. BV9PK * / **

Cantidad	Contenido	Material
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 g	MAMELON MM1-MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1-EP3
3	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO3
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
6	12 g	EFFECT LINER EL1-EL6
1	unidad	Guía de colores EFFECT ENAMEL
1	unidad	Guía de colores EFFECT CHROMA
1	unidad	Guía de colores EFFECT LINER

* También disponible como PROFESSIONAL KIT SMALL (BV9PKS) en los siguientes 15 colores: EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11

** Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4



VITA VM 9 GINGIVA KIT

Materiales gingivales de aspecto natural

Ref. BV9GK *

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
1	unidad	Guía de colores GINGIVA

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 MARGIN KIT

Sólo para pequeñas correcciones en la zona marginal
Ref. BV9MK *

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	unidad	Guía de colores MARGIN

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4



VITA VM 9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC

Surtido complementario para la personalización de VITABLOCS
Ref. BV9EKC

Cantidad	Contenido	Material
1		Juego de muestra de VITABLOCS 3D-Master
1	12 g	WINDOW WIN
1	12 g	NEUTRAL NT
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	EFFECT PEARL EP1
2	12 g	EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	CORRECTIVE COR1
1	5 g	AKZENT finishing agent Akz 25
1	7 g	Shading Paste glaze SP15
1	12 g	EFFECT OPAL E02
2	12 g	EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	MAMELON MM2
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	15 ml	VITA Shading Paste Liquid
1	envase	Soportes de cocción alveolares
1	paquete	Pernos de platino, 2 unidades
		Instrucciones de uso



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM 9	Instrucciones de uso	1190
VITA VM 9	Bloc de hojas de pedido 3D-MASTER	1194M
VITA VM 9	Bloc de hojas de pedido classical	1541M
VITA VM 9	Prospecto	1192
VITA VM 9	Hoja de información	1547
VITA VM 9	Indicador de color imprimido VITAPAN classical	1552
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
VITA VM	Carpeta de imagen completa	1284
VITA VM9 / Mark II	Instrucciones de uso	1219
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)



Productos VITAVM®9

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 9 EFFECT BONDER , 12 g *

Denominación	Ref. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB3	B4221312
EB4	B4221412
EB5	B4221512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT BONDER PASTE, 5 g *

Denominación	Ref. 5 g
EB0	B423105
EB1	B423115
EB2	B423125
EB3	B423135
EB4	B423145
EB5	B423155

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4203112	B4203150	ENL
0M2	B4203212	B4203250	ENL
0M3	B4203312	B4203350	ENL
1M1	B4203412	B4203450	ENL
1M2	B4203512	B4203550	ENL
2L1.5	B4203612	B4203650	ENL
2L2.5	B4203712	B4203750	ENL
2M1	B4203812	B4203850	ENL
2M2	B4203912	B4203950	ENL
2M3	B4204012	B4204050	ENL
2R1.5	B4204112	B4204150	ENL
2R2.5	B4204212	B4204250	ENL
3L1.5	B4204312	B4204350	ENL
3L2.5	B4204412	B4204450	ENL
3M1	B4204512	B4204550	ENL
3M2	B4204612	B4204650	ENL
3M3	B4204712	B4204750	ENL
3R1.5	B4204812	B4204850	ENL
3R2.5	B4204912	B4204950	ENL
4L1.5	B4205012	B4205050	END
4L2.5	B4205112	B4205150	END
4M1	B4205212	B4205250	END
4M2	B4205312	B4205350	END
4M3	B4205412	B4205450	END
4R1.5	B4205512	B4205550	END
4R2.5	B4205612	B4205650	END
5M1	B4205712	B4205750	END
5M2	B4205812	B4205850	END
5M3	B4205912	B4205950	END

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4206112	B4206150	ENL
0M2	B4206212	B4206250	ENL
0M3	B4206312	B4206350	ENL
1M1	B4206412	B4206450	ENL
1M2	B4206512	B4206550	ENL
2L1.5	B4206612	B4206650	ENL
2L2.5	B4206712	B4206750	ENL
2M1	B4206812	B4206850	ENL
2M2	B4206912	B4206950	ENL
2M3	B4207012	B4207050	ENL
2R1.5	B4207112	B4207150	ENL
2R2.5	B4207212	B4207250	ENL
3L1.5	B4207312	B4207350	ENL
3L2.5	B4207412	B4207450	ENL
3M1	B4207512	B4207550	ENL
3M2	B4207612	B4207650	ENL
3M3	B4207712	B4207750	ENL
3R1.5	B4207812	B4207850	ENL
3R2.5	B4207912	B4207950	ENL
4L1.5	B4208012	B4208050	END
4L2.5	B4208112	B4208150	END
4M1	B4208212	B4208250	END
4M2	B4208312	B4208350	END
4M3	B4208412	B4208450	END
4R1.5	B4208512	B4208550	END
4R2.5	B4208612	B4208650	END
5M1	B4208712	B4208750	END
5M2	B4208812	B4208850	END
5M3	B4208912	B4208950	END

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Teintes VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 GINGIVA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4223112
G2	rosa anaranjado	B4223212
G3	rosa	B4223312
G4	rojo pardusco	B4223412
G5	negro rojizo	B4223512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 MARGIN, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
M1	blanco	B4226112
M4	amarillo	B4226412
M5	ámbar	B4226512
M7	beige claro	B4226712
M8	marrón pastel	B4226812
M9	naranja claro	B4226912

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EL1	blanco	B4214112
EL2	beige	B4214212
EL3	marrón	B4214312
EL4	amarillo	B4214412
EL5	naranja	B4514512
EL6	amarillo verdoso	B4214612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CP1	color marfil	B4224112
CP2	beige amarillento	B4224212
CP3	marrón anaranjado claro	B4224312
CP4	marrón anaranjado	B4224412
CP5	marrón verdoso	B4224512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EC1	para efectos blanquecinos	B4212112
EC2	beige arena	B4212212
EC3	amarillo claro	B4212312
EC4	amarillo limón pálido	B4212412
EC5	naranja claro	B4212512
EC6	naranja	B4212612
EC7	rosa	B4212712
EC8	beige pardusco	B4212812
EC9	marrón	B4212912
EC10	marrón verdoso	B4213012
EC11	gris verdoso	B4213112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Teintes VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 MAMELON, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MM1	beige	B4216112
MM2	amarillo pardusco cálido	B4216212
MM3	naranja pálido	B4216312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EE1	blanquecino	B4209112
EE2	blanquecino translúcido	B4209212
EE3	rosa translúcido	B4209312
EE4	amarillento	B4209412
EE5	amarillento translúcido	B4209512
EE6	rojizo translúcido	B4209612
EE7	naranja translúcido	B4209712
EE8	rojo translúcido	B4209812
EE9	azulado translúcido	B4209912
EE10	azul	B4210012
EE11	gris	B4210112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
E01	neutro	B4217112
E02	blanquecino	B4217212
E03	azulado	B4217312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EP1	amarillo pastel	B4215112
EP2	naranja pastel	B4215212
EP3	rosado pastel	B4215312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4222112
COR2	beige	B4222212
COR3	marrón	B4222312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM 9 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus	B330
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1 - EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, E01-E03, EP1-EP3, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1 - EE11	B416
Guía de colores GINGIVA	G1 - G5	B417
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VM 9 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BML250N
VITA VM 9 EFFECT BONDER FLUID	Para mezclar EFFECT BONDER	50 ml	BEBF50
VITA VM PASTE FLUID	Para modificar la consistencia de las pastas EFFECT BONDER	15 ml	BPF15V1

VITAVM®9 Surtidos

Colores VITAPAN® classical A1-D4



VITA VM 9 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV9BK12C *

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
5	12 g	CROMA PLUS CP1-CP5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2, COR3
1	unidad	Lápiz VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	paquete	Bases de cocción G
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL classical (Ref. BV9BKS12C) en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3, CP1-CP5, ENL, END, NT, WIN, COR1



VITA VM 9 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV9BUK12C *

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL classical (Ref. BV9BUKS12C) en los siguientes 6 colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM 9 CLASSICAL COLOR KIT

Surtido de ampliación para los usuarios de VITA VM 9 3D-MASTER*

Ref. BV9CCK12

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
16	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso

* Surtido para los clientes de VITA VM 9 3D-MASTER que deseen ampliar su surtido actual con VITAPAN classical

Productos VITAVM®9

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT BONDER , 12 g

Denominación	Ref. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB3	B4221312
EB4	B4221412
EB5	B4221512

VITA VM 9 EFFECT BONDER PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
EB0	B423105
EB1	B423115
EB2	B423125
EB3	B423135
EB4	B423145
EB5	B423155

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4243112	B4243150	ENL
A2	B4243212	B4243250	ENL
A3	B4243312	B4243350	ENL
A3.5	B4243412	B4243450	END
A4	B4243512	B4243550	END
B1	B4243612	B4243650	END
B2	B4243712	B4243750	END
B3	B4243812	B4243850	END
B4	B4243912	B4243950	END
C1	B4244012	B4244050	END
C2	B4244112	B4244150	END
C3	B4244212	B4244250	ENL
C4	B4244312	B4244350	ENL
D2	B4244412	B4244450	END
D3	B4244512	B4244550	END
D4	B4244612	B4244650	END

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4245112	B4245150	ENL
A2	B4245212	B4245250	ENL
A3	B4245312	B4245350	ENL
A3.5	B4245412	B4245450	END
A4	B4245512	B4245550	END
B1	B4245612	B4245650	END
B2	B4245712	B4245750	END
B3	B4245812	B4245850	END
B4	B4245912	B4245950	END
C1	B4246012	B4246050	END
C2	B4246112	B4246150	END
C3	B4246212	B4246250	ENL
C4	B4246312	B4246350	ENL
D2	B4246412	B4246450	END
D3	B4246512	B4246550	END
D4	B4246612	B4246650	END

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA VM 9 3D-MASTER

VITA VM 9 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus	B331
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1 - EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, EO1-EO3, EP1-EP3, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1 - EE11	B416
Guía de colores GINGIVA	G1 - G5	B417
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VM 9 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BML250N
VITA VM 9 EFFECT BONDER FLUID	Para mezclar EFFECT BONDER	50 ml	BEBF50
VITA VM PASTE FLUID	Para modificar la consistencia de las pastas EFFECT BONDER	15 ml	BPF15V1

VITA AKZENT®

Para efectos de color superficiales naturales



Descripción del producto

VITA AKZENT es un surtido de colores para crear efectos de color naturales en la superficie. Sirve para pintar la superficie, p. ej. en la zona cervical, y para reproducir efectos de tinción naturales.

Los colores VITA AKZENT pueden utilizarse universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA.

Los colores también son ideales para la caracterización cromática de VITABLOCS.

Además, los materiales VITA AKZENT permiten crear efectos cromáticos en dientes de resina y recubrimientos de resina de VITA VM LC (véanse las instrucciones de uso especiales).

Ventajas

- utilizables universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA
- reproducción fácil y segura de efectos de tinción naturales
- resistentes y cromáticamente estables
- El modelo de la paleta de colores son los efectos que se dan en el diente natural, lo cual permite trabajar básicamente sin mezclas complicadas
- pueden mezclarse entre sí

Surtido VITA AKZENT®



Surtido VITA AKZENT en maletín de aluminio Ref. BATSET

Cantidad	Contenido	Material
20	3 g	Color AKZENT Akz01-Akz20
1	5 g	Polvos de glasear AKZENT Akz25
1	5 g	Polvos barniz AKZENT Akz26
1	20 ml	Fluido AKZENT
1	unidad	Paleta de mezclado AKZENT / INTERNO
1	unidad	Espátula de vidrio para colores
1	unidad	Pincel para pintar, marta roja nº 0
2	unidad	Guías de colores
		Instrucciones de uso

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA AKZENT	Instrucciones de uso	771

Productos VITA AKZENT®

Colores VITA AKZENT, 3 g

Denominación	Descripción	Ref. 3 g
Akz01	blanco	BAT013
Akz02	amarillo claro	BAT023
Akz03	amarillo	BAT033
Akz04	naranja	BAT043
Akz05	marrón anaranjado claro	BAT053
Akz06	curry	BAT063
Akz07	marrón anaranjado	BAT073
Akz08	almendra	BAT083
Akz09	marrón verdoso	BAT093
Akz10	arcilla	BAT103
Akz11	tabaco	BAT113
Akz12	burdeos	BAT123
Akz13	gris	BAT133
Akz14	negro	BAT143
Akz15	castaño	BAT153
Akz16	marrón oscuro	BAT163
Akz17	azul	BAT173
Akz18	arena	BAT183
Akz19	marrón claro	BAT193
Akz20	marrón medio	BAT203

VITA AKZENT Glaze, 5 g / 7,5 g / 30 g

Denominación	Ref. 5 g	Ref. 7,5 g	Ref. 30 g
Akz25	BAT255	BAT2575	BAT2530

Polvos barniz VITA AKZENT (finishing agent), 5 g

Denominación	Ref.
Akz26	BAT265

Fluido VITA AKZENT, 20 ml

Denominación	Ref.
Fluido VITA AKZENT	BATF20

VITA AKZENT Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Guía de colores nº 1	Akz01-Akz10	B420
Guía de colores nº 2	Akz11-Akz20	B421

VITA AKZENT Paleta de mezclado

Denominación	Ref.
Paleta de mezclado VITA AKZENT	B252

VITA Glaze LT

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA GLAZE LT	pasta para glasearespecial para cerámicas de bajo punto de fusión	7,5 g	B007075

VITA INTERNO®

Para la reproducción de características en el interior del diente



Descripción del producto

Los materiales VITA INTERNO ofrecen al ceramista las mejores condiciones para una reproducción perfecta de los efectos cromáticos más sutiles desde el interior. Los materiales INTERNO permiten reproducir con resultados excelentes los efectos cromáticos que aparecen en la naturaleza por incisal (contrastes sutiles). Gracias a su alto grado de fluorescencia (análogo al modelo natural), se obtiene una luminosidad penetrante de los colores.

Los colores VITA INTERNO pueden utilizarse universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA.

Ventajas

- utilizables universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA
- pueden mezclarse entre sí
- el modelo de la paleta de colores son los efectos que se dan en el diente natural, lo cual permite trabajar básicamente sin mezclas complicadas
- resistentes y cromáticamente estables

Surtido VITA INTERNO®

Surtido VITA INTERNO en maletín de aluminio
Ref. B1SET

Cantidad	Contenido	Material
11	5 g	Materiales INTERNO Int01-Int11
1	4 g	Material INTERNO Int12
1	20 ml	Fluido INTERNO
1	unidad	Paleta de mezclado INTERNO
1	unidad	Espátula de vidrio para colores
1	unidad	Pincel nº 3/0
1	unidad	Guía de colores
		Instrucciones de uso



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA INTERNO	Instrucciones de uso	770

Productos VITA INTERNO®

Materiales VITA INTERNO, 4 g / 5 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g	Ref. 5 g
Int01	blanco	-	BI015
Int02	arena	-	BI025
Int03	amarillo	-	BI035
Int04	naranja	-	BI045
Int05	terracota	-	BI055
Int06	marrón claro	-	BI065
Int07	antracita	-	BI075
Int08	azul	-	BI085
Int09	beige	-	BI095
Int10	marrón	-	BI105
Int11	marrón grisáceo	-	BI115
Int12	gris	B124	-

Fluido VITA INTERNO, 20 ml

Denominación	Ref.
Fluido VITA INTERNO	BIF20

VITA INTERNO Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Guía de colores nº 1	Int01-Int12	B422

VITA INTERNO Paleta de mezclado

Denominación	Ref.
Paleta de mezclado VITA INTERNO	B252

VITA AKZENT® Glaze Spray



Descripción del producto

VITA AKZENT Glaze Spray es un polvo pulverizable listo para su uso y de fácil aplicación. Se utiliza para el glaseado de restauraciones de cerámica sin metal y metalocerámica, tales como inlays, onlays, veneers, coronas y puentes, con una temperatura de sinterización de > 850 °C.

VITA AKZENT Glaze Spray puede utilizarse en combinación con los colores cerámicos del surtido VITA AKZENT.

Ventajas

- Aplicación fácil y segura al estar mezclado para su uso
- Procesos de trabajo más sencillos, ya que no es necesario realizar la mezcla con el líquido correspondiente
- Racional, ya que permite glasear varias restauraciones al mismo tiempo
- Aplicación especialmente uniforme y fina
- Nivel de lustre definido, sin modificar la textura superficial de la restauración
- Ideal para las restauraciones cerámicas realizadas en la consulta a partir de VITABLOCS mediante métodos CAD/CAM

Productos VITA AKZENT® Glaze Spray

VITA AKZENT GLAZE SPRAY

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA AKZENT GLAZE SPRAY	Polvo	15 g	BAT2515

Líquidos para cerámica VITA

Producto Ref.

VITA VM MODELLING LIQUID

Para el mezclado de los materiales VITA VM 7, VM 9, VM 13
BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL y EFFECT

Frasco de 50 ml BML50N
Frasco de 250 ml BML250N



VITA VM 15 MODELLING LIQUID

Para el mezclado de los materiales VITA VM 15 BASE DENTI-
NE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL y EFFECT

Frasco de 50 ml BV15ML50



VITA VM OPAQUE FLUID

Para el mezclado de los polvos VITA VM 13, VM 15 OPAQUE

Frasco 50 ml BVMOF50
Frasco 250 ml BVMOF250





VITA VM PASTE FLUID

Para el mezclado de las pastas VITA VM 13, VM 15 OPAQUE, las pastas Wash-Opaker y las pastas VITA VM 9 Effect Bonder

Frasco 15 ml

BPF15V1



HIGH SILVER MODELLING LIQUID

Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al 30%

Frasco 50 ml

BHSM50



VITA VM 9 EFFECT BONDER FLUID

Para el mezclado del polvo EFFECT BONDER

Frasco 50 ml

BEBF50



VITA MODELLING LIQUID 30 M

Para el mezclado de los polvos de dentina y esmalte para el modelado de larga duración de las cerámicas VITA con una temperatura de cocción superior a 900°

Frasco 50 ml

B30M50

Frasco 250 ml

B30M250

VITA PASTE OPAQUE LIQUID

Para modificar la consistencia de los opaquers en pasta VITA, los opaquers de color en pasta y los materiales de adhesivo en pasta

Frasco 15 ml BPOL15



VITA OMEGA 900 OPAQUE LIQUID

Para el mezclado de los opaquers VITA OMEGA 900

Frasco 50 ml BO9G50
 Frasco 250 ml BO9G250



VITA OPAQUE FLUID

Para el mezclado de opaquers VITA OMEGA, VMK 95 y TITANKERAMIK, así como de opaquers de color

Frasco 50 ml BOF50
 Frasco 250 ml BOF250



VITA MODELLING FLUID

Para el mezclado de los materiales VITA OMEGA, OMEGA 900, VMK 95, y TITANKERAMIK

Frasco 50 ml BMF50
 Frasco 250 ml BMF250





VITA SPECIAL MODELLING FLUID

Para lograr una mayor facilidad de aplicación y una estabilidad óptima con VITA OMEGA 900 y VITA VMK 95

Frasco 50 ml
Frasco 250 ml

BSMF50
BSMF250



VITA MODELLING LIQUID EXTRA

Para el mezclado de los materiales VITA OMEGA 900, VITA TITANKERAMIK, VITA VMK 95.

El líquido reduce las consecuencias de la subcocción no deseada.

Se obtiene una superficie más lisa y homogénea.

Frasco 50 ml
Frasco 250 ml

BME50
BME250



VITA Separator

Líquido separador (cerámica contra cerámica) para las cerámicas VITA

Frasco 16 ml

BSEP16



VITA Toluol

Solución limpiadora

Frasco 16 ml

BTOL 16

VITA Aislamiento de muñones

Aislamiento (cerámica contra yeso) para las técnicas cerámicas VITA (excepto la cerámica de titanio)

Frasco 16 ml

BSI16



VITA SPRAY-ON 2000



Descripción del producto

VITA SPRAY-ON 2000 es un método para la aplicación por pulverización de opaquers dentales cerámicos en polvo sobre estructuras metálicas.

El opáquer se aplica de modo uniforme mediante una pistola pulverizadora conectada al aire comprimido. Los opaquers mezclados pueden conservarse en los frascos de cristal suministrados hasta consumirlos por completo. Para limitar las emisiones asociadas al método de pulverización, se recomienda la utilización de la VITA SPRAY-BOX. El propio usuario puede montarla con unas pocas maniobras.

Para la conexión a equipos de aspiración se adjuntan plantillas con distintos radios.

Ventajas

- gran ahorro de tiempo
- una capa de opáquer uniforme y muy fina en general
- adherencia óptima del opáquer a las estructuras metálicas
- considerable reducción de costes

Surtido VITA SPRAY-ON 2000

Surtido VITA SPRAY-ON 2000

Ref. B1013D

Cantidad	Contenido	Material
29		Frascos de cristal vacíos, 26 de ellos etiquetados (1M1-5M3)
6		Tapa adaptadora, incluye juntas de obturación
1		Pistola pulverizadora con tapa de protección
1		Aguja de repuesto para la pistola pulverizadora
1		Guía de aguja de teflón
1		Espátula de vidrio IC
1		Reductor de presión completo con soporte mural
1		Soporte doble para pistolas pulverizadoras
1		Tubo flexible de presión con refuerzo textil
1		Tubo flexible de conexión, espiral
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON LIQUID
1	250 ml	VITA SPRAY-ON INDIKATOR LIQUID
1		Frasco dispensador, vacío
1		Tapa de protección para pistola pulverizadora
1		Rotulador (resistente al alcohol)
		Instrucciones de uso



VITA SPRAY-BOX para el automontaje

Ref. B102

Altura	Anchura	Profundidad
26 cm	40,5 cm	40,5 cm

Paquete VITA SPRAY-ON

Ref. B10123D

Cantidad	Contenido	Material
1	Surtido	VITA SPRAY-ON
1	unidad	VITA SPRAY-BOX



Documentación

Título
VITA SPRAY-ON 2000

Denominación
Instrucciones de uso

Ref.
492M

Productos VITA SPRAY-ON 2000

VITA SPRAY-ON 2000

Denominación	Ref.
Frasco de cristal, vacío, con cierre de rosca	B103
Tapa adaptadora, 6 unidades en bolsa de plástico	B104
Juntas de obturación para cable adaptador, 10 unidades	B210
Pistola pulverizadora con tapa de protección	B105N
Aguja de repuesto para la pistola pulverizadora	B106
Espátula de vidrio IC	B056
Reductor de presión completo con soporte mural	B107
Soporte doble para pistolas pulverizadoras	B108
2 guías de aguja de teflón	B109N
Tubo flexible de presión con refuerzo textil	B110
Tubo flexible de conexión, espiral	B111
VITA SPRAY-ON LIQUID, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON INDIKATOR LIQUID, 250 ml	B113
Frasco dispensador, vacío	B114
Tapa de protección para pistola pulverizadora	B115N
Rotulador (resistente al alcohol)	B116

Otros accesorios VITA

Producto	Ref.
Instrumentos	
VITA Pinzas hemostáticas, inoxidable, curvadas	B047
VITA Instrumento de modelado, inoxidable	B048
VITA Bisturí de modelado, inoxidable	B049
Pinzas rectas, inoxidable	B050
Pinzas curvadas, inoxidable	B051
Tijera recta, cromada	B053
Instrumento de vidrio para rotar la lámina de platino	B054
VITA Espátula de vidrio para colores	B055
Nº E 21 Cuchilla separadora	B057
Nº E 22 Cuchilla para cerámica	B058
Nº E 23 Espátula para cerámica	B059
Nº E 24 Fisurador	B060
Nº E 25 Cono de modelado	B061
Nº E 26 Raspador de cerámica	B062
Nº E 30 Espátula de vidrio	B063
Nº CS 2 Blade Holder (portahojas) *	B241
Nº CS 10 Blades (hojas), 4 unidades *	B242
Nº CS 3 Anatomic Shaping Instrument (instrumento de modelado) *	B244

* Producto descatálogo, sólo hasta fin de existencias

VITA Instrumental de cerámica estándar

en estuche de piel con cremallera, contiene una pinza hemostática, un instrumento de vidrio, un instrumento de modelado VITA, una cuchilla de modelado VITA, pinza recta y curvada, pincel de pelo de marta roja nº 1, 5 y 6, pincel para polvo nº 10 y tijera B064



VITA Instrumental de cerámica "Expert"

En estuche de piel con cremallera, contiene una unidad de cada uno de los instrumentos E24, E30, E22, E23, E26, E25 y E21 y de los pinceles E 0, E 4 y E 6 B065





VITA Karat Kit de pulido a base de diamante
 Contiene 5 g de pasta de pulido de diamante, 20 ruedas de fieltro de diamante, Ø 12 mm y 1 mandril, niquelado B068

Artículos individuales

VITA Karat Pasta de pulido de diamante, 5 g B069

VITA Karat Ruedas de fieltro de diamante, 20 unidades B070



VITA MARKER
 Rotulador piroresistente, marrón, para técnicas de cerámica sin metal VITA B073



VITA METALL CORRECTOR SET *
 Para corregir y completar estructuras de metal noble de aleaciones de cocción de elevado punto de fusión.
 El VITA METALL CORRECTOR no está indicado para prolongaciones ni correcciones de márgenes.

KIT *
 1 VITA METALL CORRECTOR Powder, B294S
 1 VITA METALL CORRECTOR Liquid,
 1 tarro de mezclado, 1 pincel e instrucciones de uso

Artículos individuales *
 VITA METALL CORRECTOR Powder, 3 g B294P
 VITA METALL CORRECTOR Liquid, 6 ml B294L

* Producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias



VITA MODISOL
 Lápiz aislante con 2 puntas (cerámica contra yeso) B075N

Pinceles

Nº 0 Pincel para pintar de pelo de marta roja	B084
Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja	B085
Nº 2 Pincel de aplicación de pelo de marta roja	B086
Nº 3 Pincel de aplicación de pelo de marta roja	B087
Nº 4 Pincel de aplicación de pelo de marta roja	B088
Nº 5 Pincel de aplicación de pelo de marta roja	B089
Nº 6 Pincel plano para pintar de turón	B090
Nº 10 Pincel para polvo	B091
Nº E 0 Pincel para pintar	B093
Nº E 4 Pincel de aplicación	B094
Nº E 6 Pincel de aplicación	B095
Nº E 8 Pincel de aplicación	B096
Nº IC 3 para In-Ceram	B195
Nº IC 4 para In-Ceram	B092
Pincel plano, para PASTE OPAQUE	B297
Nº CS 6 Hi-Class Dry Brush (pincel en seco)	B247
Nº 3/0 Pincel	B302
Puntas Stain Brush para pincel Nº 3/0 (5 unidades)	B303
Nº 8 Pincel	B304
Puntas para pincel Nº 8 (2 unidades)	B305



Kit de sondas de plata VITA

Para la comprobación de la temperatura en el horno de cerámica
 Contiene 6 zócalos de cerámica y 3 sondas de plata B230



Producto	Ref.
Espátula de amasar plástico, para PASTE OPAQUE	B227



Paletas de mezclado	
VITA Paleta de mezclado de porcelana, 12 x 19 cm	B005
Paleta de mezclado VITA AKZENT / INTERNO	B252
Paleta de mezclado VITA VM (vidrio), 33 x 23,5 cm	B324



Soportes de cocción, gris	
A con 1 espiga para 1 corona, juego de 6 unidades	B011
B con 2 espigas para 2 coronas, juego de 6 unidades	B012
C para coronas de espiga, juego de 6 unidades	B013
Algodones de soporte de cocción , paquete de 2 unidades	B017

Bases de cocción

G 55 x 45 x 5,6 mm, lado inferior con 30 orificios para insertar espigas de porcelana en cualquier disposición, también indicado como soporte de cocción para coronas y puentes. Juego de 2 bases y 20 pernos de porcelana

B009

Pernos de inserción, envase de 50 unidades, gris, de porcelana, para bases de cocción G

B023

IC para la técnica In-Ceram, envase de 2 unidades

B007

W base de cocción alveolar para coronas y puentes/para In-Ceram

B201N

Perno de platino para base de cocción alveolar W, 6 unidades, surtido

B207N



VITA Anillos de duplicado

de 28 mm de Ø

B019

de 35 mm de Ø

B021

Zócalos de duplicado

para las técnicas de cerámica sin metal

B022



VITA Material de duplicado

Reposición, contiene:

BHDUB

30 bolsas de material de duplicado, con

1 bolsa de pasta de duplicado de 30 g, líquido de 7 g y catalizador, así como vaso mezclador



VITADURVEST

para la confección de inlays, onlays y veneers de cerámica dental

Reposición, contiene:

BDV

20 bolsas de 30 g VITADURVEST material de muñón

2 frascos de 100 ml VITADURVEST líquido de mezcla

1 vaso graduado, 25 ml

1 instrucciones de uso

Envase individual

BDV100

VITADURVEST Líquido de mezcla 100 ml



VITAVM®CC

Material polimerizable en frío sin material de relleno añadido para la confección indirecta de restauraciones provisionales



Descripción del producto

VITA VM CC es un material polimerizable en frío sin material de relleno añadido.

Es ideal para la confección indirecta de prótesis provisionales.

VITA VM CC forma parte del innovador sistema de color y capas VITA VM para metalocerámica, cerámica sin metal y resina.

VITA VM CC se caracteriza por unas excelentes propiedades de manipulación. Especialmente su excelente comportamiento de mezclado y su excepcional fluidez facilitan el procesamiento.

Gracias a la facilidad de pulido y a la homogénea estructura del material, se limitan las acumulaciones de placa en un alto grado. La superficie lisa de la prótesis provisional le proporciona una sensación agradable al paciente y le ofrece mayor comodidad.

Ventajas

- Propiedades de manipulación óptimas
- Suficiente tiempo de manipulación
- Resistencia al cuarteado
- Reducido desgaste de material
- Excelente estabilidad del material, lo que conlleva la reducción del peligro de fractura gracias a la adaptación óptima entre la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad
- Mayor estabilidad de color que otros sistemas comparables
- Limitación de la acumulación de placa

Indicaciones

- Confección de coronas y puentes provisionales
- Fijación de dientes de resina VITA, p. ej., en esqueléticos
- Reparaciones
- Recubrimiento de conectores en prótesis combinadas

Surtidos VITAVM® CC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASIC KIT 16-COLOR

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. CVCCBK16

Cantidad	Contenido	Material
16	30 g	BASE DENTINE *
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	100 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* En los siguientes colores: 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1



VITA VM CC BASIC KIT 5-COLOR

Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC

Ref. CVCCBK5

Cantidad	Contenido	Material
5	30 g	BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	30 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso



VITA VM CC PROFESSIONAL KIT

Para añadir efectos y características naturales

Ref. CVCCPK *

Cantidad	Contenido	Material
5	30 g	EFFECT LINER EL2-EL6

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4



Productos VITAVM®CC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g *

Denominación	Ref. 30 g	Ref. 100 g	Asignación del esmalte
0M1	C4703130	C47031100	ENL
1M1 (~ B1)	C4703430	C47034100	ENL
2L1.5 (~ B2)	C4703630	C47036100	ENL
2M1 (~ A1)	C4703830	C47038100	ENL
2M2 (~ A2)	C4703930	C47039100	ENL
2M3	C4704030	C47040100	ENL
3L1.5 (~ C2/D4)	C4704330	C47043100	ENL
3L2.5 (~ B3)	C4704430	C47044100	ENL
3M1 (~ C1/D2)	C4704530	C47045100	ENL
3M2 (~ A3/D3)	C4704630	C47046100	ENL
3M3 (~ B4)	C4704730	C47047100	ENL
3R1.5	C4704830	C47048100	ENL
3R2.5 (~ A3.5)	C4704930	C47049100	ENL
4L1.5 (~ C3)	C4705030	C47050100	END
4M2 (~ A4)	C4705330	C47053100	END
5M1 (~ C4)	C4705730	C47057100	END

* Los colores VITAPAN classical A1-D4 indicados no son idénticos a los colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER, sino que representan la mejor aproximación posible.

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g *

Denominación	Descripción	Ref. 30 g	Ref. 100 g
ENL	claro	C4719130	C47191100
END	oscuro	C4719230	C47192100

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM CC WINDOW, 30 g *

Denominación	Descripción	Ref. 30 g
WIN	transparente	C4718130

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g *

Denominación	Descripción	Ref. 30 g
EL2	beige	C4714230
EL3	marrón	C4714330
EL4	amarillo	C4714430
EL5	naranja	C4714530
EL6	amarillo verdoso	C4714630

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA VM CC Líquidos *

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM CC LIQUID	líquido	30 ml	CVCCCL30
VITA VM CC LIQUID	líquido	100 ml	CVCCCL100

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

Surtidos VITAVM® CC

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA VM CC BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. CVCCBKC *

Cantidad	Contenido	Material
15	30 g	BASE DENTINE A1-D4 (excepto B1)
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	100 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL classical (Ref. CVCCBKSC) en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM CC CLASSICAL COLOR KIT

Surtido de ampliación para los usuarios de VITA VM 9 3D-MASTER*

Ref. CVCCCKC

Cantidad	Contenido	Material
15	30 g	BASE DENTINE A1-D4 (excepto B1)
1	100 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	Guía de colores VITAPAN classical
		Instrucciones de uso

* Surtido para los clientes de VITA VM 9 3D-MASTER que deseen ampliar su surtido actual con VITAPAN classical



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM CC	Instrucciones de uso	1439
VITA VM CC	Bloc de hojas de pedido 3D-MASTER	1441
VITA VM CC	Bloc de hojas de pedido classical	1549

Productos VITAVM®CC

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominación	Ref. 30 g	Ref. 100 g	Asignación del esmalte
A1	C4743130	C47431100	ENL
A2	C4743230	C47432100	ENL
A3	C4743330	C47433100	ENL
A3.5	C4743430	C47434100	END
A4	C4743530	C47435100	END
B2	C4743730	C47437100	END
B3	C4743830	C47438100	END
B4	C4743930	-	END
C1	C4744030	-	END
C2	C4744130	C47441100	END
C3	C4744230	C47442100	ENL
C4	C4744330	-	ENL
D2	C4744430	-	END
D3	C4744530	C47445100	END
D4	C4744630	-	END

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA VM CC 3D-MASTER

VITAVM®LC

Composite de micropartículas fotopolimerizable para restauraciones fijas y removibles



Descripción del producto

Como todos los materiales de la gama VITA VM, VITA VM LC se caracteriza por un comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte.

El material de relleno inorgánico, con unas partículas primarias de un tamaño de sólo unos pocos nanómetros y una distribución especialmente homogénea, proporciona una gran translucidez gracias a la dispersión natural de la luz.

El sistema de unión VITA VM BOND, perteneciente al sistema VITA VM LC, garantiza una unión segura entre la aleación y VITA VM LC.

Indicaciones

- recubrimiento integral y parcial de coronas, puentes, coronas telescópicas y estructuras de material sintético para los dientes anteriores y posteriores
- Inlays / Veneers
- coronas sin metal y puentes de tres piezas de dientes anteriores como restauración provisional de larga duración
- personalización de dientes de resina VITA

Ventajas

- resultados estéticos excelentes
- armonización ideal de las propiedades mecánicas con las indicaciones
- propiedades de manipulación óptimas, p. ej. facilidad de modelado
- limitación de las decoloraciones secundarias y de la acumulación de placa
- oferta compacta de materiales complementarios para personalizar las prótesis

Surtidos VITAVM® LC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VM LC BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. CVLCBKV1

Cantidad	Contenido	Material
26	10 g	OPAQUE 1M1-5M3
26	4 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
3	4 g	EFFECT LINER EL2, EL3, EL4
2	10 ml	OPAQUE LIQUID
1	10 ml	SOLVENT for VITA VM BOND/LC OPAQUE
1	30 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR for VITA VM LC
1	unidad	Píncel plano
1	unidad	Cuchara graduada / espátula de amasar
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

VITA VM LC BASIC KIT SMALL

Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC

Ref. CVLCBKS1

Cantidad	Contenido	Material
15	10 g	OPAQUE *
15	4 g	BASE DENTINE *
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
3	4 g	EFFECT LINER EL2, EL3, EL4
1	10 ml	OPAQUE LIQUID
1	10 ml	SOLVENT for VITA VM BOND/LC OPAQUE
1	30 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR for VITA VM LC
1	unidad	Píncel plano
1	unidad	Cuchara graduada / espátula de amasar
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* En los siguientes colores: 1M1, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, 5M2

VITA VM LC PROFESSIONAL KIT
 Para añadir efectos y características naturales
 Ref. CVLCPKV1

Cantidad	Contenido	Material
3	10 g	COLOR OPAQUE CO1-CO3
2	4 g	EFFECT LINER EL5, EL6
3	4 g	EFFECT ENAMEL EE3, EE6, EE9
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
		Instrucciones de uso



VITA VM LC PAINT KIT
 Materiales de color intenso
 Ref. CVLCPKV1

Cantidad	Contenido	Material
10	2 g	PAINT PT1-PT19
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
		Instrucciones de uso



VITA VM LC GINGIVA KIT
 Materiales gingivales de aspecto natural
 Ref. CVLCGKV1

Cantidad	Contenido	Material
1	10 g	GINGIVA OPAQUE GOL
4	4 g	GINGIVA G1, G2, G4, G5
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
		Instrucciones de uso





VITA VM LC TEETH INDIVIDUALIZATION KIT
 Para la individualización de dientes de resina
 Ref. CVLCTIK

Cantidad	Contenido	Material
10	2 g	PAINT PT1, PT3, PT5, PT8, PT9, PT12, PT13, PT15, PT17, PT19
1	2 g	WINDOW WIN
3	4 g	EFFECT ENAMEL EE3, EE6, EE9
1	4 g	NEUTRAL NT
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	30 ml	MODELLING LIQUID
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables
		Instrucciones de uso



VITA VM 7 BLEACHED COLOR KIT
 Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados
 Ref. CVLCBLK

Cantidad	Contenido	Material
2	10 g	OPAQUE OM1, OM3
2	4 g	BASE DENTINE OM1, OM3
1	4 g	ENAMEL ENL
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
1	unidad	Pincel plano
1	unidad	Cuchara graduada / espátula de amasar
1	10 ml	OPAQUE LIQUID
1	10 ml	SOLVENT for VITAVM BOND/LC OPAQUE
1	30 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP OM
		Instrucciones de uso



VITA VM LC BLEACHED COLOR ADD-ON KIT
 Kit de ampliación para el Basic Kit y el Basic Kit Small
 Ref. CVLCBLAK

Cantidad	Contenido	Material
2	10 g	OPAQUE OM1, OM3
2	4 g	BASE DENTINE OM1, OM3
1	4 g	ENAMEL ENL
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP OM
		Instrucciones de uso

VITA VM LC INLAY / VENEER KIT

Para restauraciones sin metal

Ref. CVLCIVK

Cantidad	Contenido	Material
6	4 g	BASE DENTINE 1M2, 2M2, 3M3, 2L1.5, 3R2.5, 3L2.5
1	4 g	ENAMEL ENL
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR for VITA VM LC
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
1		Instrucciones de uso



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM LC	Instrucciones de uso, incluyen VITA VM BOND	1200
VITA VM LC	Encarte, incluye VITA VM BOND	1227
VITA VM LC	Bloc de hojas de pedido, incluye VITA VM BOND	1196M
VITA VM	Prospecto	1218
Dientes VITA, Individualización de dientes de resina con VITA VM LC	Prospecto del sistema	1245
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)



Productos VITAVM®LC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Denominación	Ref. 10 g
0M1	C4400110
0M3	C4400310
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
0M1	C440314	ENL
0M3	C440334	ENL
1M1	C440344	ENL
1M2	C440354	ENL
2L1.5	C440364	ENL
2L2.5	C440374	ENL
2M1	C440384	ENL
2M2	C440394	ENL
2M3	C440404	ENL
2R1.5	C440414	ENL
2R2.5	C440424	ENL
3L1.5	C440434	ENL
3L2.5	C440444	ENL
3M1	C440454	ENL
3M2	C440464	ENL
3M3	C440474	ENL
3R1.5	C440484	ENL
3R2.5	C440494	ENL
4L1.5	C440504	END
4L2.5	C440514	END
4M1	C440524	END
4M2	C440534	END
4M3	C440544	END
4R1.5	C440554	END
4R2.5	C440564	END
5M1	C440574	END
5M2	C440584	END
5M3	C440594	END

VITA VM LC ENAMEL, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
ENL	claro	C441914
END	oscuro	C441924

VITA VM LC NEUTRAL, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
NT	translúcido	C442014

VITA VM LC WINDOW, 2 g

Denominación	Descripción	Ref. 2 g
WIN	transparente	C441812

VITA VM LC COLOR OPAQUE, 10 g

Denominación	Descripción	Ref. 10 g
C01	naranja	C4428110
C02	marrón	C4428210
C03	lila	C4428310

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE, 10 g

Denominación	Descripción	Ref. 10 g
G0L	rosa claro	C4427110

VITA VM LC GINGIVA, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
G1	rosa antiguo	C442314
G2	rosa anaranjado	C442324
G4	rojo pardusco	C442344
G5	negro rojizo	C442354

VITA VM LC EFFECT LINER, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
EL2	beige	C441424
EL3	marrón	C441434
EL4	amarillo	C441444
EL5	naranja	C441454
EL6	amarillo verdoso	C441464

VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
EE3	rosa translúcido	C440934
EE6	rojizo translúcido	C440964
EE9	azulado translúcido	C440994

VITA VM LC PAINT, 2 g

Denominación	Descripción	Ref. 2 g
PT1	blanco	C444012
PT3	amarillo	C444032
PT5	marrón anaranjado claro	C444052
PT8	almendra	C444082
PT9	marrón verdoso	C444092
PT12	burdeos	C444122
PT13	gris	C444132
PT15	castaño	C444152
PT17	azul	C444172
PT19	marrón claro	C444192

VITA VM LC Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID	Líquido de opáquer	10 ml	CVML0L10
VITA VM SOLVENT for VITA VM BOND / LC OPAQUE	Solución limpiadora	10 ml	CVMB0S10
VITA VM LC MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	10 ml	CVMLM10
VITA VM LC MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	30 ml	CVMLM30
VITA VM LC SEPARATOR	Aislamiento de modelo	30 ml	CVMLS30

VITAVM®**BOND** for VITAVM®**LC**

Sistema de unión para VITA VM LC



Descripción del producto

El sistema de unión de color neutro VITA VM BOND proporciona una unión segura y permanente entre la aleación dental y el VITA VM LC.

La capa elástica de unión actúa como un tampón entre la aleación y el composite y absorbe las fuerzas masticatorias.

Ventajas

- unión físico-química segura y duradera
- aplicación rápida gracias a una consistencia agradable
- no aparecen fisuras marginales, ni tensiones, ni zonas frágiles debidas a la contracción de polimerización
- secado óptimo del sistema de unión por calor mediante el aparato de secado VITA SICCO THERM

Surtido VITAVM®**BOND** for VITAVM®**LC**

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VM BOND KIT for VITA VM LC Ref. CVBK

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	BOND for VITA VM LC
2	5 ml	BOND LIQUID for VITA VM LC
1	10 ml	SOLVENT for VITA VM BOND/LC OPAQUE
1	unidad	Bloc de mezcla, 100 hojas
2	unidades	Soporte para pinceles, blanco
1	unidad	Cuchara graduada / espátula de amasar
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 50 unidades
		Instrucciones de uso

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM LC	Instrucciones de uso, incluye VITA VM BOND	1200
VITA VM LC	Encarte, incluye VITA VM BOND	1227
VITA VM LC	Bloc de hojas de pedido, incluye VITA VM BOND	1196M
VITA SICCOTHERM	Encarte, incluye VITA VM BOND	1262

Productos VITAVM®**BOND** for VITAVM®**LC**

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM BOND for VITA VM LC

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM BOND for VITA VM LC	Polvo	12 g	C4429112
VITA VM BOND LIQUID for VITA VM LC	Líquido de mezcla	5 ml	CVMBL5
VITA VM SOLVENT for VITA VM BOND/LC OPAQUE	Solución limpiadora	10 ml	CVMBS10
Cuchara graduada / espátula de amasar (2 caras)		1 unidad	C013

VITA ZETA[®] HLC BOND

Sistema de unión-opáquer para resinas de recubrimiento VITA ZETA



Descripción del producto

VITA ZETA HLC BOND es un sistema de unión opaco que sirve para conseguir una unión segura y resistente a la hidrólisis entre resinas de recubrimiento VITA ZETA y metal.

Ventajas

- sirve de sistema de unión y a la vez de opáquer, de modo que se ahorra un paso de trabajo
- fuerza adhesiva optimizada gracias a su principio de acción quimicofísico

Productos VITA ZETA® HLC BOND

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ZETA HLC BOND, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
1M1	C43014
1M2*	C43024
2L1.5	C43034
2L2.5*	C43044
2M1	C43054
2M2	C43064
2M3	C43074
2R1.5*	C43084
2R2.5*	C43094
3L1.5	C43104
3L2.5	C43114
3M1	C43124
3M2	C43134
3M3	C43144
3R1.5	C43154
3R2.5	C43164
4L1.5	C43174
4L2.5*	C43184
4M1*	C43194
4M2	C43204
4M3*	C43214
4R1.5*	C43224
4R2.5*	C43234
5M1	C43244
5M2*	C43254
5M3*	C43264

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HLC BOND COLOR, 4 g *

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
CO11**	blanco	C5BCO114
CO12	rosa	C5BCO124
CO13**	marrón	C5BCO134
CO14**	azul	C5BCO144

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

** producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HLC BOND Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA HLC BOND LIQUID	Líquido de mezcla	5 ml	C5BL5
VITA ZETA HLC BOND CONDITIONER	Adhesivo	10 ml	C5BC10
VITA ZETA HLC BOND CLEANING SOLVENT	Solución limpiadora	10 ml	C5BCS10

Productos VITA ZETA® HLC BOND

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA ZETA HLC BOND, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
A1	C5B0A14
A2	C5B0A24
A3	C5B0A34
A3.5	C5B0A354
A4	C5B0A44
B2	C5B0B24
B3	C5B0B34
B4*	C5B0B44
C1*	C5B0C14
C2	C5B0C24
C3	C5B0C34
C4*	C5B0C44
D2	C5B0D24
D3	C5B0D34
D4*	C5B0D44

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA ZETA	Instrucciones de uso	907

VITA ZETA[®] HEAT CURING COMPOSITE

Composite de recubrimiento termopolimerizable



Descripción del producto

VITA ZETA HC COMPOSITE es un composite de recubrimiento termopolimerizable homogéneo y sin metilmetacrilato.

Indicaciones

- recubrimiento de coronas, puentes y coronas telescópicas
- confección de coronas sin metal y recubrimientos totales en la zona de los dientes anteriores
- remodelación y adaptación de veneers confeccionados con dientes de resina VITA

Ventajas

- sin metilmetacrilato
- elevada resistencia a la abrasión
- gran resistencia a los disolventes
- excelentes valores de elasticidad y resiliencia, por lo que se recomienda especialmente para recubrimientos en coronas secundarias
- pasta lista para usar

Productos VITA ZETA® HEAT CURING COMPOSITE

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ZETA HC COMPOSITE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
1M1	C47614	EN11
1M2*	C47624	EN11
2L1.5	C47634	EN11
2L2.5*	C47644	EN12
2M1	C47654	EN11
2M2	C47664	EN12
2M3	C47674	EN11
2R1.5*	C47684	EN11
2R2.5*	C47694	EN11
3L1.5	C47704	EN13
3L2.5	C47714	EN12
3M1	C47724	EN13
3M2	C47734	EN12
3M3	C47744	EN13
3R1.5	C47754	EN11
3R2.5	C47764	EN13
4L1.5	C47774	EN13
4L2.5*	C47784	EN13
4M1*	C47794	EN12
4M2	C47804	EN13
4M3*	C47814	EN13
4R1.5*	C47824	EN12
4R2.5*	C47834	EN13
5M1	C47844	EN13
5M2*	C47854	EN13
5M3*	C47864	EN13

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE ENAMEL, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
EN11	C5HEN114
EN12	C5HEN124
EN13	C5HEN134
EN14**	C5HEN144

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

** producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE GINGIVA, 4 g * / **

Denominación	Ref. 4 g
G	C5HG4

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

** producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE NECK, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
NE11	C5HNE114
NE12	C5HNE124
NE13	C5HNE134
NE14	C5HNE144

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA ZETA HC COMPOSITE TRANSLUCENT, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
T11**	C5HT114
T12**	C5HT124
T13**	C5HT134
T14	C5HT144

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

** producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE INTENSIVE, 3 ml * / **

Denominación	Ref. 3 ml
IN11	C5HIN113
IN12	C5HIN123
IN13	C5HIN133
IN14	C5HIN143
IN15	C5HIN153
IN16	C5HIN163
IN17	C5HIN173
IN18	C5HIN183
IN19	C5HIN193
IN20	C5HIN203

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

** producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA HC COMPOSITE SPECIAL INSULATING LIQUID	Aislamiento especial	30 ml	C5HSI30
VITA ZETA HC COMPOSITE COATING VARNISH	Barniz de cobertura	30 ml	C5HCV30
VITA ZETA HC COMPOSITE MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	30 ml	C5HM30

Productos VITA ZETA® HEAT CURING COMPOSITE

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA ZETA HC COMPOSITE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
A1	C5HDA14	EN11
A2	C5HDA24	EN11
A3	C5HDA34	EN11
A3.5	C5HDA354	EN13
A4	C5HDA44	EN11
B2	C5HDB24	EN12
B3	C5HDB34	EN11
B4*	C5HDB44	EN11
C1*	C5HDC14	EN11
C2	C5HDC24	EN12
C3	C5HDC34	EN12
C4*	C5HDC44	EN12
D2	C5HDD24	EN12
D3	C5HDD34	EN13
D4*	C5HDD44	EN11

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE ENAMEL, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
EN11	C5HEN114
EN12	C5HEN124
EN13	C5HEN134
EN14*	C5HEN144

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA HC COMPOSITE NECK, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
A2	C5HNEA24
A3	C5HNEA34
A3.5	C5HNEA354
B3	C5HNEB34
C2	C5HNEC24
D3	C5HNED34

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA ZETA HC COMPOSITE 3D-MASTER

VITA ZETA HC COMPOSITE Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA HC COMPOSITE SPECIAL INSULATING LIQUID	Aislamiento especial	30 ml	C5HSI30
VITA ZETA HC COMPOSITE COATING VARNISH	Barniz de cobertura	30 ml	C5HCV30
VITA ZETA HC COMPOSITE MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	30 ml	C5HM30

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA ZETA	Instrucciones de uso	907

VITA ZETA[®] LIGHT CURING COMPOSITE

Composite de recubrimiento para la fotopolimerización

Descripción del producto

VITA ZETA LC COMPOSITE es una pasta fotopolimerizable para coronas y puentes con una frita de feldespato multifásica como material de relleno. Gracias a la equilibrada distribución granulométrica de la frita de feldespato multifásica, el material presenta una gran resistencia a la abrasión y una elevada resiliencia sin ser quebradizo.

Indicaciones

- recubrimiento de coronas, puentes, coronas telescópicas y estructuras de resina
- confección de coronas sin metal y de puentes de tres piezas en la zona de los dientes anteriores
- Inlays / Veneers
- remodelación de dientes de resina VITA

Ventajas

- elevada resiliencia
- resistencia a la abrasión óptima

Productos VITA ZETA[®] LIGHT CURING COMPOSITE

Colores VITAPAN[®] classical A1-D4

VITA ZETA LC COMPOSITE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
A1	C5LDA14	EN11
A2	C5LDA24	EN11
A3	C5LDA34	EN11
A3.5	C5LDA354	EN13
A4	C5LDA44	EN11
B2	C5LDB24	EN12
B3	C5LDB34	EN11
B4*	C5LDB44	EN11
C1*	C5LDC14	EN11
C2	C5LDC24	EN12
C3	C5LDC34	EN12
C4*	C5LDC44	EN12
D2*	C5LDD24	EN12
D3	C5LDD34	EN13
D4*	C5LDD44	EN11

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE NECK, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
NE11	C5LNE114
NE12	C5LNE124
NE13	C5LNE134
NE14	C5LNE144
A2**	C5LNEA24
A3*	C5LNEA34
A3.5*	C5LNEA354
B3*	C5LNEB34
C2*	C5LNEC24
D3*	C5LNED34

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE ENAMEL y FISORA, 4 g

Denominación	Ref. 4 g ENAMEL	Ref. 4 g FISORA
EN11	C5LEN114	C5LFEN114*
EN12	C5LEN124	C5LFEN124*
EN13	C5LEN134	C5LFEN134*
EN14	C5LEN144*	C5LFEN144*
EN15	C5LEN154*	C5LFEN154*

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE TRANSLUCENT, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
T11*	C5LT114
T12*	C5LT124
T13*	C5LT134
T14	C5LT144

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE GINGIVA, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
G	C5LG4

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE INTENSIVE, 3 ml *

Denominación	Ref. 3 ml
IN11	C5LIN113
IN12	C5LIN123
IN13	C5LIN133
IN14	C5LIN143
IN15	C5LIN153
IN16	C5LIN163
IN17	C5LIN173
IN18	C5LIN183
IN19	C5LIN193
IN20	C5LIN203

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE OPTIMIZER OPAQUE DENTINE, 3 g *

Denominación	Ref. 3 g
VITAPAN classical grupo cromático A: OD-A	C5LOODA3
VITAPAN classical grupo cromático B: OD-B	C5LOODB3
VITAPAN classical grupo cromático C: OD-C	C5LOODC3
VITAPAN classical grupo cromático D: OD-D	C5LOODD3

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE OPTIMIZER DENTINE, 3 g *

Denominación	Ref. 3 g
D A2	C5LODA23
D B3	C5LODB33
D D3	C5LODD33

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE OPTIMIZER ENAMEL, 3 g *

Denominación	Ref. 3 g
EN 11	C5LOEN113
EN 14	C5LOEN143

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE OPTIMIZER TRANSLUCENT, 3 g *

Denominación	Ref. 3 g
T 14	C5LOT143

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE OPTIMIZER WINDOW, 3 g *

Denominación	Ref. 3 g
WIN	C5LOWIN3

* producto discontinuado: artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias

VITA ZETA LC COMPOSITE Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA LC COMPOSITE SPECIAL INSULATING LIQUID	Aislamiento especial	30 ml	C5LSI30
VITA ZETA LC MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	30 ml	C5LM30

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA ZETA	Instrucciones de uso	907

VITA ZETA® COLD CURING POLYMER

Material de recubrimiento polimerizable en frío

Descripción del producto

VITA ZETA CC POLYMER es un material autopolimerizable o polimerizable en frío, sin material de relleno añadido, indicado para prótesis provisionales y para reparaciones extrabucales.

Indicación

- confección de coronas y puentes provisionales
- fijación de dientes y de veneers confeccionados con dientes de resina de VITA, p. ej. en esqueléticos
- recubrimiento de conectores en prótesis combinadas

Ventajas

- excelentes propiedades físicas
- elevada resistencia a cargas quimicofísicas en la boca
- extraordinaria facilidad de modelado
- superficie de alto brillo tras el pulido que impide en gran medida la formación de placa

Observación

VITA ZETA CC será sustituido por VITA VMCC. artículo disponible hasta el 31.12.2008, hasta agotar existencias.

Productos VITA ZETA® COLD CURING POLYMER

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ZETA CC POLYMER DENTINE, 19 g / 75 g

Denominación	Ref. 19 g	Ref. 75 g	Asignación del esmalte
1M1	C486119	-	EN11
1M2	C486219	-	EN11
2M1	C486519	C486575	EN11
2M2	C486619	C486675	EN12
2M3	C486719	-	EN11
3M1	C487219	-	EN13
3M2	C487319	C487375	EN12
3M3	C487419	C487475	EN13
4M1	C487919	C487975	EN12
4M2	C488019	C488075	EN13
4M3	C488119	-	EN13
5M1	C488419	-	EN13
5M2	C488519	-	EN13
5M3	C488619	-	EN13

VITA ZETA CC POLYMER ENAMEL, 10 g *

Denominación	Ref. 10 g
EN11	C5CEN1110
EN12	C5CEN1210
EN13	C5CEN1310
EN14	C5CEN1410

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA ZETA CC POLYMER NECK, 10 g *

Denominación	Ref. 10 g
NE11	C5CNE1110
NE12	C5CNE1210
NE13	C5CNE1310
NE14	C5CNE1410

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA ZETA CC POLYMER TRANSPARENT, 10 g *

Denominación	Ref. 10 g
T	C5CT10

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4

VITA ZETA CC POLYMER Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA CC POLYMER LIQUID	Líquido	30 ml	C5CL30
VITA ZETA CC POLYMER LIQUID	Líquido	100 ml	C5CL100

Productos VITA ZETA® COLD CURING POLYMER

Colores VITAPAN® classical A1-D4

VITA ZETA CC POLYMER DENTINE, 19 g / 75 g

Denominación	Ref. 19 g	Ref. 75 g	Asignación del esmalte
A1	C5CDA119	C5CDA175	EN11
A2	C5CDA219	C5CDA275	EN11
A3	C5CDA319	C5CDA375	EN11
A3.5	C5CDA3519	C5CDA3575	EN13
A4	C5CDA419	C5CDA475	EN11
B2	C5CDB219	C5CDB275	EN14
B3	C5CDB319	C5CDB375	EN11
B4	C5CDB419	C5CDB475	EN11
C1	C5CDC119	C5CDC175	EN11
C2	C5CDC219	C5CDC275	EN12
C3	C5CDC319	C5CDC375	EN12
C4	C5CDC419	C5CDC475	EN12
D2	C5CDD219	C5CDD275	EN14
D3	C5CDD319	C5CDD375	EN13
D4	C5CDD419	C5CDD475	EN11

VITA ZETA CC POLYMER ENAMEL, 10 g

Denominación	Ref. 10 g
A1/ A2	C5CENA110
A3.5	C5CENA3510
B3 / B4	C5CENB310
C2 / C3	C5CENC210
A3 /A4	C5CENA310
B2 / D3	C5CENB210
C1 / D2	C5CENC110
C4 / D4	C5CENC410
EN11	C5CEN1110
EN12	C5CEN1210
EN13	C5CEN1310
EN14	C5CEN1410

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITAPAN classical A1-D4) véase VITA ZETA COLD CURING POLYMER 3D-MASTER

VITA ZETA CC POLYMER Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA CC POLYMER LIQUID	Líquido	30 ml	C5CL30
VITA ZETA CC POLYMER LIQUID	Líquido	100 ml	C5CL100

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA ZETA	Instrucciones de uso	907

Accesorios Coronas y puentes VITA



Producto Ref.

Paleta de mezclado C014
negra, de porcelana, con tapa, 8,5 x 11 cm

Instrumentos

Instrumento de vidrio B054
VITA instrumento de modelado especial de coronas y puentes nº 1, de dos extremos C003
VITA instrumento de modelado y de corte de coronas y puentes nº 2, de dos extremos C004
VITA instrumento de modelado de coronas y puentes nº 3, de dos extremos C005

Otros accesorios

Cuchara graduada, de plástico C006
Cuchara graduada / espátula de amasar 2 caras, de plástico (fig.) C013
Bloc de mezcla (100 hojas) C100
Pincel nº 0, de marta roja B084
Pincel nº 2, de marta roja B086
Pincel nº 4, de marta roja B088
Pincel Nº 10, pincel para polvo B091
Soporte para pincel, blanco FCPHW
Puntas de pincel desechables, paquete de 50 unidades FCPS
Pincel plano B296
Guía de colores VITA VM "Individual" con 16 varillas de colores vacías B423