

Tabla de cocción VMK Master en hornos Programat

Programa	B °C	S min	H min	V1 °C	V2 °C	t °C/min	T °C	
Cocción de oxidación		Consulte las instrucciones del fabricante de la aleación!						
cocción WASH OPAQUE	400	2	1	400	959	80	960	
cocción WASH OPAQUE PASTE	400	6	1	400	959	80	960	
cocción de OPAQUE	400	2	1	400	949	80	950	
cocción de OPAQUE PASTE	400	6	1	400	949	80	950	
cocción MARGIN y LUMINARY	400	6	1	400	939	55	940	
1. cocción dentina	400	6	1	400	929	55	930	
2. cocción dentina	400	6	1	400	919	55	920	
glaseado	400	1	1			90	930	
glaseado con VITA AKZENT	400	4	1			90	920	

Estos datos nos fueron facilitados por clientes nuestros. No nos podemos hacer responsable de su aplicación.