

VITA VMK Master®

Información sobre el producto




Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 10.09

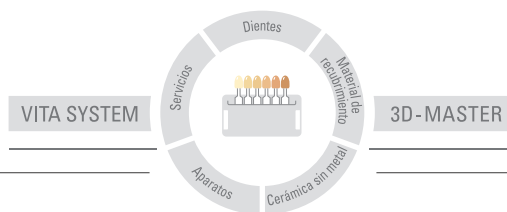

VITA

Para el recubrimiento de estructuras metalocerámicas con un valor CET convencional.

Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical A1–D4.

VITA VMK Master® ¡Sencillez innovadora en la 3.ª generación!



Todos conocemos el fenómeno de que algunas marcas comerciales se convierten en denominaciones de uso cotidiano. Algunos ejemplos conocidos son las marcas Kleenex, Dodotis y Google.

En la década de 1960, se impuso el término VMK (procedente del alemán **VITA Metallkeramik**, metalocerámica VITA) que, actualmente, sigue utilizándose en odontología. Este término es consecuencia de las actividades de desarrollo de VITA: metalocerámica VITA.

En Europa, VITA Zahnfabrik fue la primera en desarrollar y comercializar un sistema de recubrimiento metalocerámico.

VITA VMK Master® Mayor perfeccionamiento.



Utilizando VITA VMK Master, dispone de un material moderno que, sin problema alguno, le permite resolver desde situaciones sencillas hasta casos complejos con características individuales. Gracias a su temperatura de cocción óptima y a sus propiedades fisicoquímicas, VITA VMK Master es idónea para el recubrimiento de estructuras sin metales nobles.


Resumen de las ventajas

- Material comprometido con la seguridad y la estética.
- Mejora del proceso de fabricación "Master" (estabilización del material para la reproducción eficaz) para disponer de propiedades de elaboración de primera calidad.
- Esquema clásico de estratificación dentina-zona incisal.
- Amplia oferta de materiales complementarios para la personalización.




Frita de opalescencia VITA

VITA VMK Master® Fiel a la tradición.

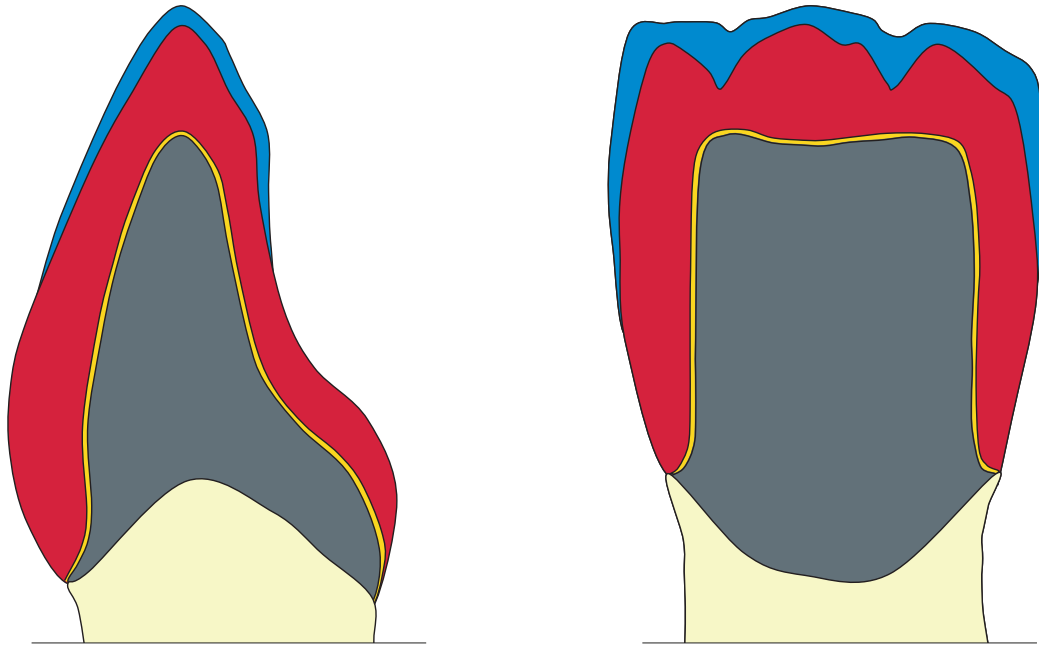

Esquema clásico de estratificación

- Seguro, rápido y convincente con la estratificación estándar clásica.
- Amplia oferta de materiales complementarios, por ejemplo, Luminaries para aumentar la fluorescencia y Translucent para la reproducción de las transparencias más variadas del esmalte dental natural, así como efectos de profundidad.
- Las mejores condiciones para una adaptación óptima a los dientes remanentes naturales.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical A1–D4.

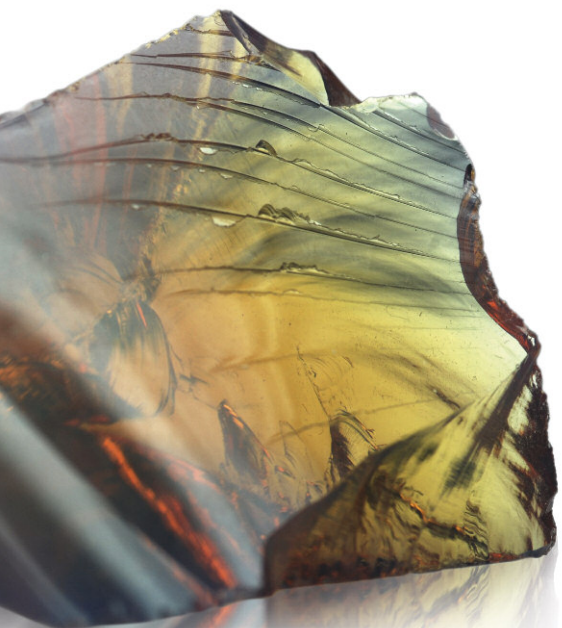

VITA VMK Master® Múltiples aplicaciones. Opinión unánime.

Max Pfundner, Alemania:

VITA VMK Master es una cerámica muy lograda. Los materiales para hombros dentales de VITA VMK Master son geniales. La forma es totalmente estable.

Marcio Breda, Brasil:

VMK Master me gusta mucho. Gracias a esta cerámica, logro obtener una reproducción perfecta de los colores, similar a los dientes naturales.

Richard Zimmermann, Alemania:

VITA VMK Master es una cerámica con un efecto muy translúcido y de profundidad, con la que da gusto trabajar. Sobre todo me ha entusiasmado el efecto de los materiales complementarios (Dentine Modifier y materiales Translucent).

Waldemar Motta, Brasil:

En las restauraciones con VITA VMK Master, el comportamiento de reflexión de la luz es óptimo en comparación con el diente natural.

Heiner Creutzfeldt, Alemania:

VITA VMK Master es una cerámica que no ofrece complicación alguna. Puede conseguirse un recubrimiento similar a los dientes naturales sin una laboriosa estratificación.



VITA VMK Master® Ajuste perfecto.

	<p>VITA Linearguide 3D-MASTER/VITA Toothguide 3D-MASTER®</p> <p>El VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar el color dental correcto de forma rápida y precisa. La nueva guía VITA Linearguide 3D-MASTER constituye una alternativa a la acreditada guía VITA Toothguide 3D-MASTER y se diferencia de la misma por la disposición lineal de las muestras de color.</p>
	<p>VITA Easyshade® Compact</p> <p>El VITA Easyshade Compact permite determinar de forma rápida y unívoca el color dental, así como verificarlo en restauraciones cerámicas. Este ligero aparato, inalámbrico y móvil, es muy fácil de usar y muestra el color dental de forma segura en sólo unos segundos. Su elevada precisión de medición de los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical A1-D4 se debe al sistema espectrofotométrico utilizado, que constituye la base para obtener un resultado perfecto.</p>
	<p>Guía de colores VITAPAN® classical A1–D4</p> <p>La original, para la determinación del color dental en los colores VITAPAN classical A1–D4.</p>
	<p>VITA AKZENT®</p> <p>Surtido de maquillajes con 20 colores fluorescentes en polvo para proporcionar efectos naturales a las superficies.</p>
	<p>VITA Interno®</p> <p>Materiales que permiten efectos cromáticos con efecto de profundidad. Su elevada fluorescencia hace que los colores sean especialmente luminosos.</p>
	<p>Aparato de cocción VITA VACUMAT® 6000 M</p> <p>El aparato de cocción totalmente automático y controlado por microprocesador es idóneo para todas las cocciones de cerámicas dentales. El horno destaca por su excelente calidad y una serie de novedades técnicas que proporcionan una calidad de cocción, seguridad de uso, confort y ahorro de tiempo insuperables. Se presenta en acero fino y lacado antracita.</p>
	<p>VITA VACUMAT "New Generation", para soluciones individuales flexibles</p> <p>El sistema de cocción modular incluye un aparato de cocción de primera calidad VITA VACUMAT 6000 M para todas las cocciones de cerámica dental y tres mandos a elegir adaptados a distintas necesidades (vPad easy, vPad comfort, vPad excellence), los cuales permiten el manejo simultáneo de hasta cuatro hornos con un solo mando. El usuario se decide sólo por aquellos módulos que necesita en ese momento y siempre tiene la posibilidad de ampliar su sistema posteriormente con más componentes (hornos, mandos, accesorios), componiendo así un sistema de hornos perfectamente adaptado a sus necesidades y extremadamente atractivo desde el punto de vista económico.</p>



El éxito reside en la innovación.


Las exigencias a las restauraciones metalocerámicas en cuanto a funcionalidad y estética siguen aumentando, por lo que actualmente nos enfrentamos al reto de desarrollar materiales que permitan al protésico dental obtener un resultado satisfactorio con un esfuerzo relativamente pequeño. Al mismo tiempo, también deben ofrecerse posibilidades amplias para realizar personalizaciones exigentes.

En el mercado internacional, se han impuesto con éxito VITA VMK 68 y VITA VMK 95, lo cual queda claramente reflejado en los más de 350 millones de unidades colocadas desde el año 1968.

Ahora, con VITA VMK Master, se inicia una nueva era evolutiva en la historia de éxito de VMK.

La metalocerámica VITA VMK Master está disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical A1-D4. Se garantiza la compatibilidad cromática con todos los materiales VITA 3D-MASTER y VITAPAN classical.

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.

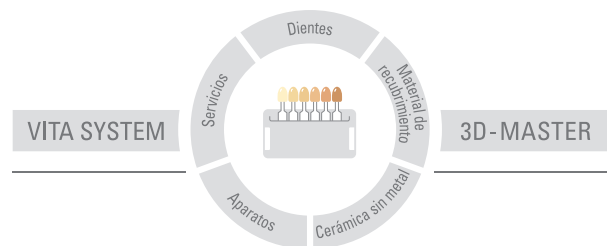

Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. Publicación de estas instrucciones de uso: 10.09

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y los siguientes productos llevan el marcado **CE 0124** :

VITA VMK Master® · VITA AKZENT® · VITA INTERNO®

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com