

VITA VMK Master®

Para el recubrimiento total de estructuras metálicas con un valor CET convencional



Toma del color VITA


Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA

Control del color VITA

Versión 10.09

VITA SYSTEM

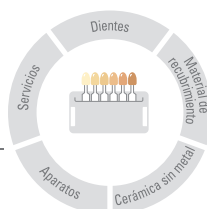

3D-MASTER

VITA

Descripción del producto

VITA VMK Master es una cerámica de recubrimiento de feldespato para estructuras metálicas con un valor CET convencional de aleaciones con un contenido alto de oro, aleaciones con un contenido reducido de oro y aleaciones con base de paladio. Gracias a su temperatura de cocción óptima y a sus propiedades fisicoquímicas, VITA VMK Master es especialmente idónea para el recubrimiento de estructuras sin metales nobles.

Ventajas

- Material comprometido con la seguridad y la estética.
- Mejora del proceso de fabricación "Master" (siglas en alemán de "estabilización del material para la reproducción eficaz") para disponer de propiedades de elaboración de primera calidad, por ejemplo, mayor facilidad de modelado, tendencia a la contracción mínima.
- Esquema clásico de estratificación dentina-zona incisal.
- Extensa oferta de materiales complementarios para la personalización.
- Restauraciones de gran valor estético gracias a los colores brillantes.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITAPAN classical

VITA VMK Master® Surtidos: colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master STANDARD SET 3D-MASTER

Surtido estándar para la reproducción de los colores 3D-MASTER
Ref. BVMKSET3D**/**

Unidades	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
26	12 g	OPAQUE DENTINE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
2	12 g	ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	—	Indicador de color 3D-MASTER
1	—	VITA Linearguide 3D-MASTER
—	—	Accesorios
1	—	Instrucciones de uso

* Los siguientes colores también se presentan como 10 COLOR SET (ref. BVMK10S3D):
(1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2)

** Disponible también con OPAQUE PASTE (ref. BVMKSETP3D / ref. BVMK10SP3D)



VITA VMK Master STARTER SET 3D-MASTER (2M2, 3M2)

Surtido de dos colores
Ref. BVMKSS3D*

Unidades	Contenido	Material
2	12 g	OPAQUE OP2, OP3
2	12 g	OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
2	—	Varillas de colores 2M2, 3M2
1	—	Instrucciones de uso

* Disponible también con PASTE OPAQUE (ref. BVMKSSP3D)



VITA VMK Master BLEACHED COLOR SET 3D-MASTER*

Colores especialmente luminosos para reproducir dientes blanqueados
Ref. BVMKBSC

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE OP0
3	12 g	OPAQUE DENTINE 0M1-0M3
3	12 g	DENTINE 0M1-0M3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	—	BLEACHED SHADE GUIDE 0M1-0M3
1	—	Instrucciones de uso

* Disponible también con PASTE OPAQUE (ref. BVMKBSP)

VITA VMK Master® Surtidos: colores VITAPAN® classical A1-D4



VITA VMK Master STANDARD SET classical

Surtido estándar para la reproducción de los colores

VITAPAN classical A1-D4

Ref. BVMKSETC*

Unidades	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE W0
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	OPAQUE DENTINE A1-D4
16	12 g	DENTINE A1-D4
2	12 g	ENAMEL EN1, EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	–	Indicador de color VITAPAN classical
1	–	Guía de colores VITAPAN classical
–	–	Accesorios
1	–	Instrucciones de uso

* Disponible también con PASTE OPAQUE (ref. BVMKSETPC)



VITA VMK Master STARTER SET (A2, A3)

Surtido de dos colores

Ref. BVMKSSC*

Unidades	Contenido	Material
2	12 g	OPAQUE A2, A3
2	12 g	OPAQUE DENTINE A2, A3
2	12 g	DENTINE A2, A3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
2	–	Varillas de colores A2, A3
1	–	Instrucciones de uso

* Disponible también con PASTE OPAQUE (ref. BVMKSSCP)

VITA VMK Master® Surtidos complementarios para VITA SYSTEM 3D-MASTER® y VITAPAN® classical



VITA VMK Master ADDITIONAL SET

Para añadir efectos y características naturales
Ref. BVMKAS

Unidades	Contenido	Material
8	12 g	TRANSLUCENT T1-T8
8	12 g	DENTINE MODIFIER DM1-DM8
6	12 g	LUMINARY LM1-LM6
6	12 g	MARGIN MN, M1-M5
1	12 g	OPAL TRANSLUCENT OT1
1	12 g	PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	–	Guía de colores TRANSLUCENT
1	–	Guía de colores DENTINE MODIFIER/LUMINARY
1	–	Guía de colores MARGIN/GINGIVA



VITA VMK Master GINGIVA SET

Materiales gingivales de aspecto natural
Ref. BVMKGS*

Unidades	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
2	12 g	GOL, GOD
1	–	Guía de colores MARGIN/GINGIVA

* Disponible también con PASTE OPAQUE (ref. BVMKGSF)



Sistema de cajas modulares VITA

Todos los surtidos VITA VMK Master se envían en cajas de cartón corrugado de alta calidad.

Las cajas modulares VITA pueden pedirse posteriormente (contra pago).

Caja completa n.º 2 con dos cajones (para VITA VMK Master Standard Set, 10 Color Set): ref.: ZMBK2

Caja completa n.º 1 con un cajón (para VITA VMK Master Additional Set): ref. ZMBK1



Documentos / medios publicitarios

Título	Denominación	Ref.
VITA VMK Master	Instrucciones de uso	1645D
VITA VMK Master	Folleto de producto	1651D
VITA VMK Master	Ficha de producto	1693D
VITA VMK Master	Rueda de combinaciones	1659M
VITA VMK Master	Formulario de pedido 3D-MASTER	1654M*
VITA VMK Master	Formulario de pedido classical	1655M*

* Se puede descargar en www.vita-zahnfabrik.com

VITA VMK Master® Tablas de correspondencias para VITA SYSTEM 3D-MASTER® y VITAPAN® classical

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER	OPAQUE	MARGIN	LUMINARY	NECK	CERVICAL	ENAMEL
0M1	OP0	M1	LM1	–	–	EN1
0M2	OP0	M1	LM1	–	–	EN1
0M3	OP0	M1/M2*	LM1/LM2*	–	–	EN1
1M1	OP1	MN/M2*	LM1/LM2*	N1	CE1	EN1
1M2	OP1	M1/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN1
2L1.5	OP2	MN/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN1
2L2.5	OP2	M2/M3*	LM1/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
2M1	OP2	MN/M2*	LM2	N1	CE1	EN1
2M2	OP2	M2/M3*	LM2/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
2M3	OP2	M3	LM2/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
2R1.5	OP2	M2/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN1
2R2.5	OP2	M3	LM2/LM3*	N1/N2*	CE2	EN1
3L1.5	OP3	M2/M5*	LM2/LM6*	N1/N5*	CE2	EN1
3L2.5	OP3	M3/M5*	LM3/LM6*	N1/N3*	CE2/CE3*	EN1
3M1	OP3	M1/M5*	LM2	N1/N5*	CE2	EN1
3M2	OP3	MN/M5*	LM2/LM3*	N2	CE1/CE3*	EN1
3M3	OP3	M3/M5*	LM3	N2/N3*	CE2/CE3*	EN1
3R1.5	OP3	MN/M5*	LM2	N1/N5*	CE2	EN1
3R2.5	OP3	M3/M5*	LM3/LM6*	N2/N3*	CE1/CE3*	EN3
4L1.5	OP4	M5	LM2/LM6*	N1/N5*	CE2	EN1
4L2.5	OP4	M3/M5*	LM3/LM5*	N3	CE1/CE3*	EN1
4M1	OP4	M2/M5*	LM6	N1/N5*	CE2	EN1
4M2	OP4	M5	LM2/LM5*	N1/N5*	CE1/CE3*	EN3
4M3	OP4	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N4*	CE3	EN3
4R1.5	OP4	M2/M5*	LM2/LM5*	N1/N5*	CE2	EN1
4R2.5	OP4	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N4*	CE1/CE3*	EN3
5M1	OP5	M5	LM5/LM6*	N1/N5*	CE1/CE3*	EN1
5M2	OP5	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N5*	CE2/CE3*	EN3
5M3	OP5	M3/M5*	LM3/LM5*	N3/N4*	CE3	EN3

Colores VITAPAN classical A1-D4	OPAQUE	MARGIN	LUMINARY	NECK	CERVICAL	ENAMEL
A1	OP A1	M1/M3*	LM2	N1	CE1	EN1
A2	OP A2	MN/M3*	LM2	N1/N2*	CE1/CE2*	EN1
A3	OP A3	M3	LM3/LM6*	N1/N3*	CE2	EN1
A3,5	OP A3,5	M3/M5*	LM3/LM6*	N3	CE1/CE3*	EN2
A4	OP A4	MN/M5*	LM2/LM5*	N1/N5*	CE3	EN2
B1	OP B1	MN/M2*	LM1/LM2*	N1	CE1	EN2
B2	OP B2	M2/M3*	LM2	N1	CE1/CE2*	EN2
B3	OP B3	M3	LM3/LM6*	N1/N2*	CE2	EN2
B4	OP B4	M3	LM3/LM6*	N1/N3*	CE2/CE3*	EN2
C1	OP C1	MN/M2*	LM2	N1	CE1	EN2
C2	OP C2	M2/M5*	LM2/LM6*	N1/N5*	CE1	EN2
C3	OP C3	M2/M5*	LM6	N1/N5*	CE1/CE2*	EN1
C4	OP C4	M5	LM5/LM6*	N5	CE3	EN1
D2	OP D2	M2/M5*	LM2/LM6*	N1/N5*	CE1/CE2*	EN2
D3	OP D3	M3/M5*	LM6	N1/N5*	CE2	EN2
D4	OP D4	M2/M3*	LM3/LM6*	N1/N5*	CE2/CE3*	EN2

Las correspondencias sólo son valores orientativos.

* Proporción de mezcla: 1:1

VITA VMK Master® Materiales complementarios para
VITA SYSTEM 3D-MASTER® y VITAPAN® classical

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
--------------	-------------	-----------

VITA VMK Master WASH OPAQUE

WO	naranja dorado	B4825912
----	----------------	----------

VITA VMK Master NECK

N1	beige	B4824112
N2	amarillo	B4824212
N3	amarillo-naranja	B4824312
N4	naranja	B4824412
N5	caqui	B4824512

VITA VMK Master ENAMEL

EN1	blanquecino	B4819112
EN2	amarillento-neutro	B4819212
EN3	rojizo	B4819312

VITA VMK Master WINDOW

WIN	transparente	B4818112
-----	--------------	----------

VITA VMK Master TRANSLUCENT

T1	blanquecino	B4809112
T2	amarillento-pardusco	B4809212
T3	rosa	B4809312
T4	neutro	B4809412
T5	azul claro	B4809512
T6	azul	B4809612
T7	gris	B4809712
T8	rojizo	B4809812

VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT

OT1	neutro	B4817112
-----	--------	----------

VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT

PLT1	nácar-crema	B4815112
------	-------------	----------

VITA VMK Master CERVICAL

CE1	amarillo claro	B4820112
CE2	naranja claro	B4820212
CE3	amarillo dorado	B4820312

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
--------------	-------------	-----------

VITA VMK Master DENTINE MODIFIER

DM1	blanco	B4812112
DM2	crema	B4812212
DM3	amarillo	B4812312
DM4	naranja	B4812412
DM5	rojizo	B4812512
DM6	pardusco-rojizo	B4812612
DM7	caqui	B4812712
DM8	gris	B4812812

VITA VMK Master MARGIN

MN	neutro	B4826012
M1	blanco	B4826112
M2	beige	B4826212
M3	amarillo	B4826312
M4	naranja-rojizo	B4826412
M5	marrón claro	B4826512

VITA VMK Master LUMINARY

LM1	blanco	B4814112
LM2	arena	B4814212
LM3	amarillo	B4814312
LM4	marrón-naranja claro	B4814412
LM5	marrón claro	B4814512
LM6	caqui claro	B4814612

VITA VMK Master GINGIVA

G1	rosa antiguo	B4823112
G2	naranja-rosa	B4823212
G3	rosa-rojo	B4823312
G4	rojo pardusco	B4823412
G5	rojo negruzco	B4823512
GOL	claro	B4827112
GOD	oscuro	B4827312

VITA VMK Master CORRECTIVE

COR1	neutro	B4822112
COR2	beige	B4822212

VITA